



KOD KATALOGOWY	AM-OSS-05
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ORTEZA KOSTKI AM-OSS-05
CODE	AM-OSS-05
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-OSS-05

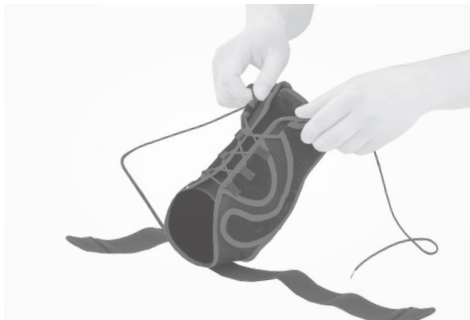


- 1. PL:** Rozepnij ortezę i poluzuj sznurówkę.  
**EN:** Unfasten the brace and loosen the shoelace.




- 2. PL:** Załóż ortezę na nogę (1).  
**EN:** Put the brace on your leg (1).

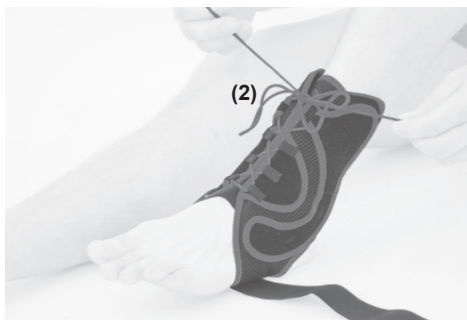

- 3. PL:** Zawiąż sznurówki (2).  
**EN:** Tie the laces (2).

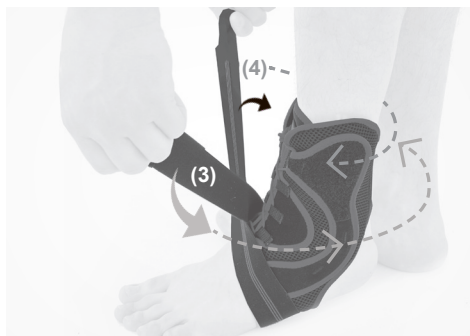

- 4. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij pasy ósemkowe (3,4) na rzepy (5,6) według wskazanego kierunku.  
**EN:** Set the proper compression and fasten the Figure 8 straps (3,4) with Velcro (5,6) according to the indicated direction.

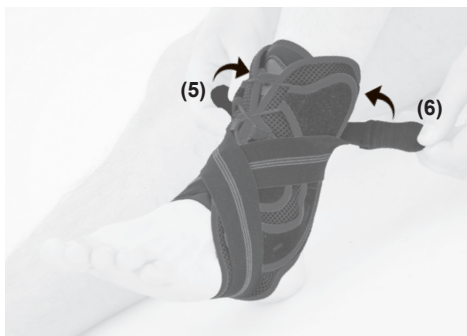



**5. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.