

KOD KATALOGOWY	AM-SX-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ORTEZA KOSTKI AM-SX-03
CODE	AM-SX-03
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-SX-03




1. PL: Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.



2. PL: Załóż ortezę na nogę.
EN: Put the brace on the leg.



3. PL: Zapnij rzep (1).
EN: Fasten the Velcro (1).

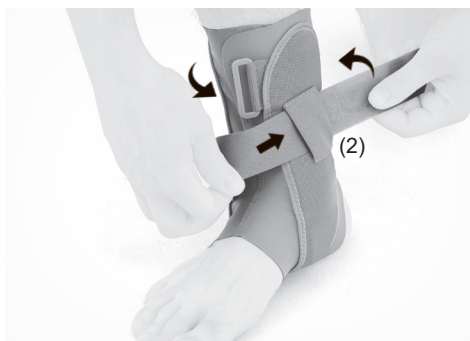

4. PL: Przepleć taśmę przez szlufkę (2), następnie przepleć przez klamrę (3) i zapnij rzep.
EN: Interlace the strap through the belt loop (2), then interlace through the buckle (3) and fasten the Velcro.





5. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.