

KOD KATALOGOWY	AM-SX-08
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ORTEZA KOSTKI AM-SX-08
CODE	AM-SX-08
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-SX-08



- 1. PL:** Rozepnij ortezę i umieść stopę na wkładce (1).  
**EN:** Unbuckle the brace and place your foot on the insole (1).





- 2. PL:** Przyłóż łuski (2) do stawu skokowego, w taki sposób, aby odpowiednio przylegały do kostek. Przypnij pasek (3) do rzepa stabilizującego (4).  
**EN:** Check that the shells are properly attached to the ankle (2). Adjust the strap (3) to reach correct tension and fasten with the Velcro (4).
- 3. PL:** Zapnij pasek (5) na rzep (6) zawijając go nad stawem skokowym.  
**EN:** Fasten the Velcro strap (5) (6) over the ankle joint.



**4. PL:** Ustaw odpowiednie napięcie paska (7) i zapnij na rzep (8).

**EN:** Adjust the strap (7) to reach correct tension and fasten with the Velcro (8).

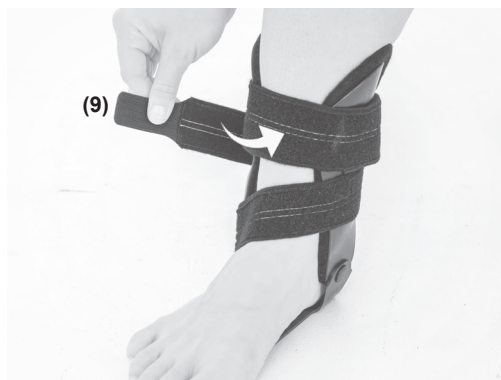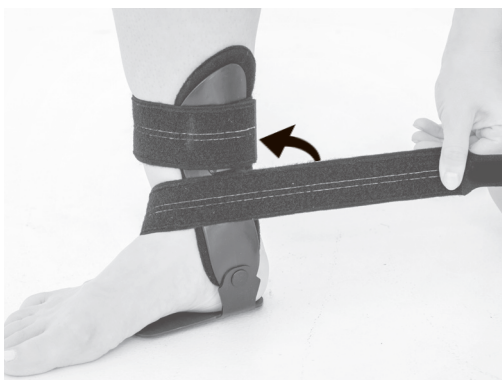

**5. PL:** Opleć pasek obwodowy wokół nogi i zapnij na rzep (9).

**EN:** Wrap the strap around the ankle and close it with the Velcro fastener (9).



**6. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.