


KOD KATALOGOWY	AM-OSS-13
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ORTEZA KOSTKI AM-OSS-13
CODE	AM-OSS-13
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-OSS-13

POZIOM STABILIZACJI / LEVEL OF STABILIZATION


I STOPIEŃ / I DEGREE

NISKA STABILIZACJA
LOW STABILIZATION

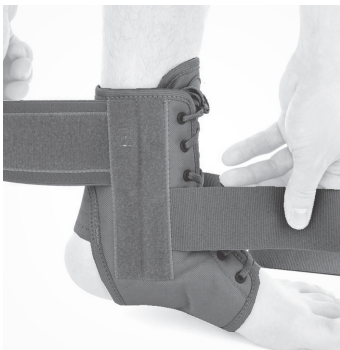


II STOPIEŃ / II DEGREE

ŚREDNIA STABILIZACJA
MILD STABILIZATION

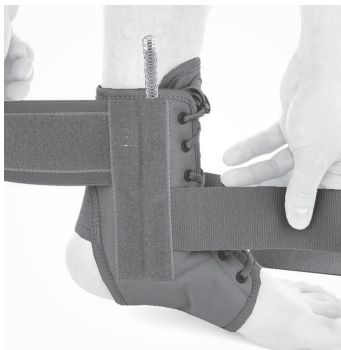


III STOPIEŃ / III DEGREE

WYSOKA STABILIZACJA
HIGH STABILIZATION

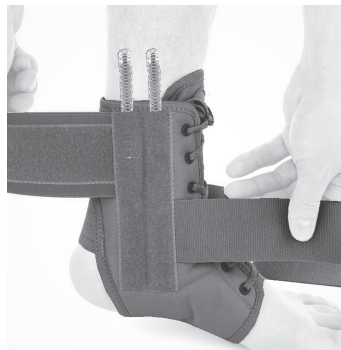



1. PL: W zależności od poziomu stabilizacji, zamontuj po 1 lub 2 fiszbiny z każdej strony ortezy. Istnieje również możliwość stosowania ortezy bez fiszbiny.

EN: Depending on the level of stabilization, install 1 or 2 underwires on each side of the brace. It is also possible to use the brace without underwires.

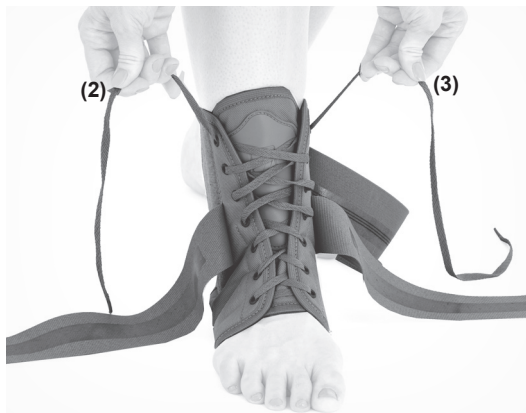


2. PL: Rozepnij orteżę, załóż na nogę (1) i zawiąż sznurówki (2,3).

EN: Unfasten the brace, put it on your leg (1) and tie the laces (2,3).

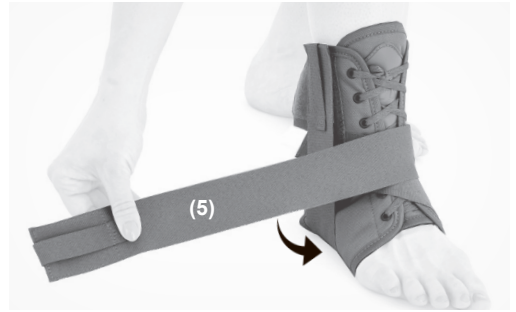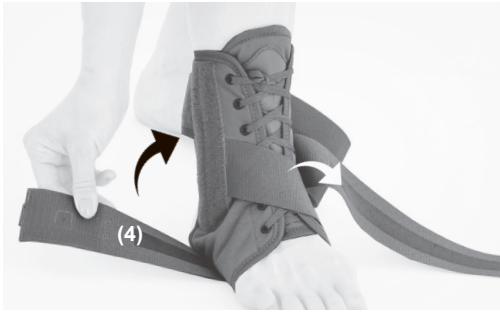

- 3. PL:** Zapnij pasy ósemkowe (4,5) według wskazanego kierunku, ustawiając ich odpowiednie napięcie.
EN: Fasten the Figure-8 straps (4,5) according to the indicated direction, adjusting the proper tension.

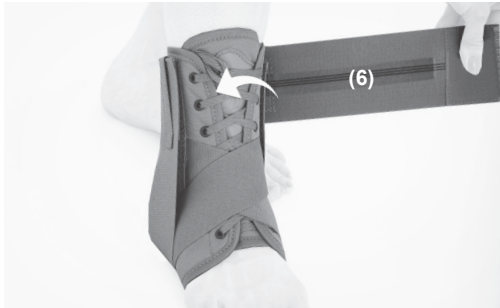

- 4. PL:** Zapnij pas (6) na rzep (7) według wskazanego kierunku.
EN: Close the Velcro (6) strap (7) according to the indicated direction.



- 5. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.