


KOD KATALOGOWY	AM-SL-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA ŁOKCIA
MODEL	ORTEZA ŁOKCIA AM-SL-03
CODE	AM-SL-03
TRADE NAME	ELBOW ORTHOSIS
MODEL	ELBOW ORTHOSIS AM-SL-03




1. **PL:** Załóż ortezę na rękę.  
**EN:** Place the brace on the limb.




2. **PL:** Dopasuj wysokość pelot ramienia i przedramienia.  
**EN:** Adjust the place of the arm and forearm elements.

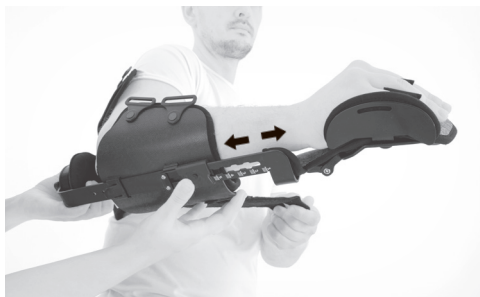


3. **PL:** Ustaw długość szyny dłoniowej.  
**EN:** Adjust the length of the hand and forearm splint.

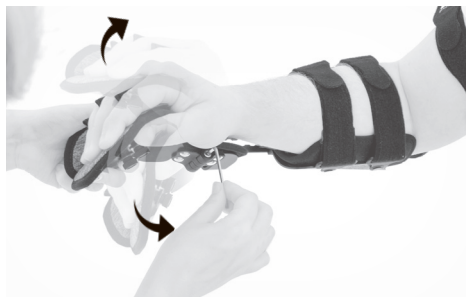

4. **PL:** Za pomocą kluczyka imbusowego ustaw odpowiednią pozycję dłoni.  
**EN:** Adjust the required hand position with the Allen key.

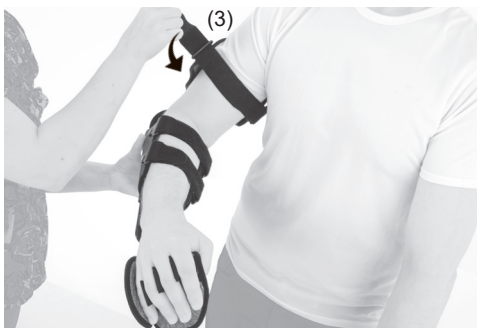

5. **PL:** Zapnij taśmy obwodowe przedramienia (1 i 2) i ramienia (3).  
**EN:** Fasten the wrap-around straps on the forearm (1 and 2) and arm (3).

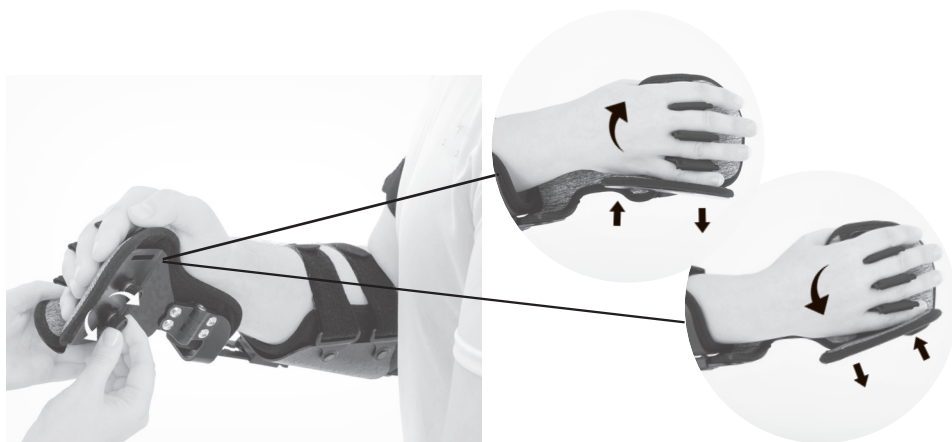

- 6. PL:** Za pomocą pokręteł ustaw dłoń w odwiedzeniu do łokciowym lub do promieniowym.  
**EN:** Place the hand in the required radial or ulnar abduction.



- 7. PL:** Zapnij osłony palców.  
**EN:** Attach the finger straps.



- 8. PL:** Za pomocą pokrętła ustaw przedramię w pożądanej pozycji supinacji, pronacji lub neutralnej.  
**EN:** Place the forearm in the required supination, pronation or central position by using the knob.



- 9. PL:** Przełóż pasek przez ramię i zapnij karabińczyk.  
**EN:** Place the belt through the shoulder and fasten the clasp.



- 10. PL:** Przyłóż rękę do tembla i zapnij klamrę.  
**EN:** Fasten the sling.



- 11. PL:** Za pomocą regulatora dopasuj długość taśmy w temblaku.  
**EN:** Use the buckle to adjust the length of the tape.

- 12. PL:** Gotowy wyrób - wersja z szyną.  
**EN:** Product is ready to use.

**PL: DEMONTAŻ SZYNY DŁONIOWEJ Z SYSTEMEM PRESS-SLIDE**  
**EN: HOW TO REMOVE THE SPLINT?**



- 1. PL:** Za pomocą kluczyka zdemontuj blokadę szynę.  
**EN:** Unscrew and remove the splint with the Allen key.



- 2. PL:** Wyjmij szynę z systemu Press-slide.  
**EN:** Remove the splint.



- 3. PL:** Zapnij paski ramienia i przedramienia według wcześniejszego schematu i zapnij temblak.  
**EN:** Fasten the straps and attach the sling.



- 4. PL:** Gotowy wyrób - wersja bez szyny.  
**EN:** Product is ready to use.