


Orteza została wyposażona w szynę boczną, która posiada **blokadę kąta zgięcia (A)** w zakresie: 30°, 50°, 70° oraz **blokadę wyprost (B)** w zakresie: 0°, 20°.

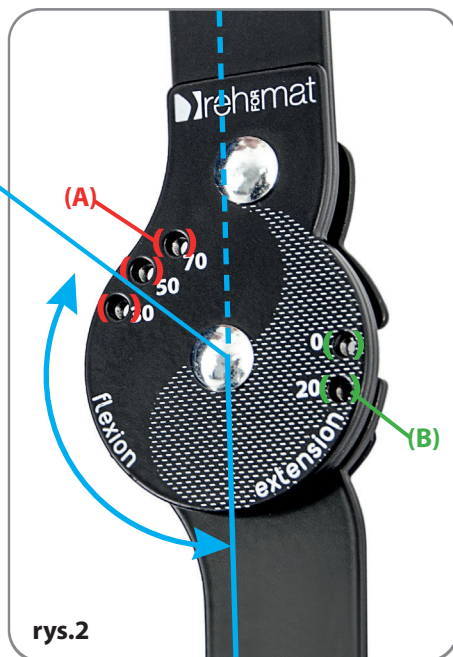

1. Przed ustawieniem szyny, usuń wszystkie wkręty blokujące umieszczone w zegarze (**rys.1**)
2. Ustaw ortezę w przybliżonym położeniu, w którym chcesz ograniczyć **zgięcie/wyprost (rys.2)**
3. W otwór oznaczony odpowiednią wartością kąta wkręć od spodu dołączone śruby blokujące oraz sprawdź poprawność działania i zakres ruchów zegara (**rys.2**)

ZAKRES RUCHÓW I JEGO WARTOŚCI KĄTOWE USTALA LEKARZ PROWADZĄCY!

UWAGA: Jeżeli orteza wyposażona jest w dwie szyny boczne, regulacji należy dokonać osobno na obydwu szynach, ustawiając ten sam kąt zgięcia lub wyprost. Szyny boczne nie wymagają konserwacji



REH4MAT

Ul. Piaski 47, 36-060 Głogów Małopolski | Polska

tel. +48 16 62 142 20

Fax +48 16 62 21 42 13


e-mail: biuro@reh4mat.com

www.probraces.com

www.reh4mat.com

HOW TO SET UP THE FLEXION AND EXTENSION IN 1RP SPLINT - INSTRUCTION

This brace is equipped with the following ROM adjustment **flexion (A)** in the scope of: 30°, 50°, 70° and **extension (B)** in the scope of: 0°, 20°.

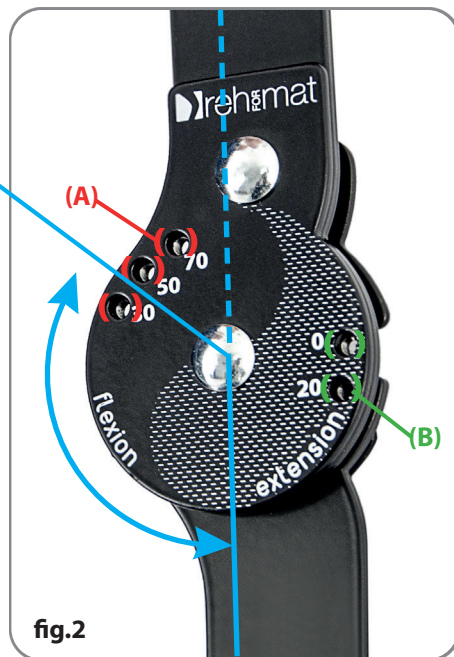

1. Before setting up the splint, remove the screws from it (fig.1)
2. Place the brace in the position in which you want to adjust the **flexion/extension** (fig.2)
3. Place the screw in the hole setting appropriate angle and check the if it works correctly (fig.2)

THE ANGLE OF FLEXION AND EXTENSION IS SPECIFIED BY THE DOCTOR OR PHYSIOTHERAPIST!

ATTENTION: If the brace is equipped with 2 side splints, adjustment is done on each side splint separately setting the same angle of flexion and extension. Side splints do not require maintenance



REH4MAT

Ul. Piaski 47, 36-060 Głogów Małopolski | Polska

tel. +48 16 62 142 20

Fax +48 16 62 21 42 13

e-mail: biuro@reh4mat.com

www.probraces.com

www.reh4mat.com