
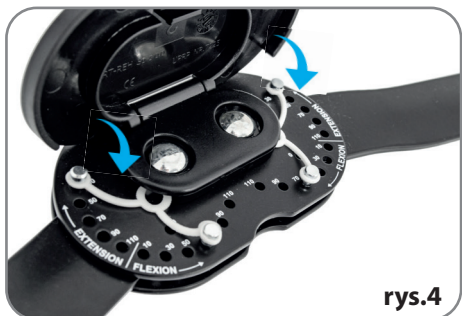
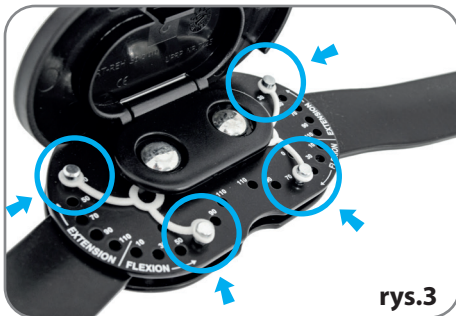


Orteza została wyposażona w szynę boczną, która posiada blokadę kąta **zgięcia (A)** w zakresie: 0°, 10°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110° oraz blokadę **wyprostu (B)** w zakresie: 30°, 50°, 70°, 90°, 110°.

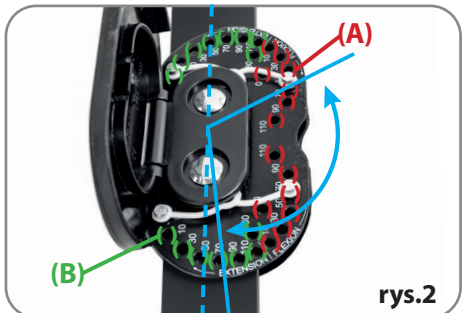

1. Otwórz klapy zabezpieczającą (**rys.1**)
2. Przed ustawieniem szyny, usuń wszystkie blokujące nity umieszczone w zegarze
3. Ustaw ortezę w przybliżonym położeniu, w którym chcesz ograniczyć **zgięcie/wyprost (rys.2)**
4. Zablokuj ramiona szyny (dwustronnie) wkładając we właściwe otwory 4 nity blokujące (**rys.3**)
5. Zamknij klapy (**rys.4**) i sprawdź poprawność działania i zakres ruchów zegara

ZAKRES RUCHÓW I JEGO WARTOŚCI KĄTOWE USTALA LEKARZ PROWADZĄCY!

UWAGA: Jeżeli orteza wyposażona jest w dwie szyny boczne, regulacji należy dokonać osobno na obydwu szynach bocznych, ustawiając ten sam kąt zgięcia lub wyprostu (punkt 1- 4). Szyny boczne nie wymagają konserwacji

ROM ADJUSTMENT INSTRUCTION OF 2-AXIAL SPLINT 2R WITH EXTENSION ABSORBING

The brace is equipped with a side splint with a bending **flexion (A)** in the scope of: 0°, 10°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110° and **the extension lock (B)**: 30°, 50°, 70°, 90°, 110°.



fig.1

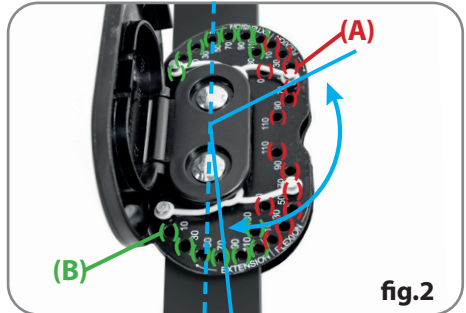


fig.2

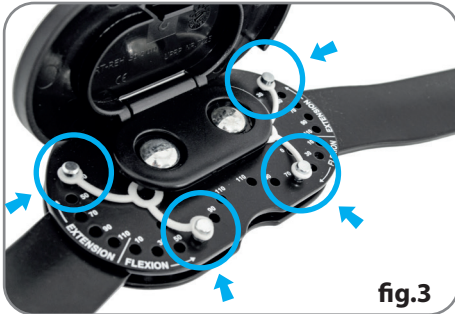


fig.3

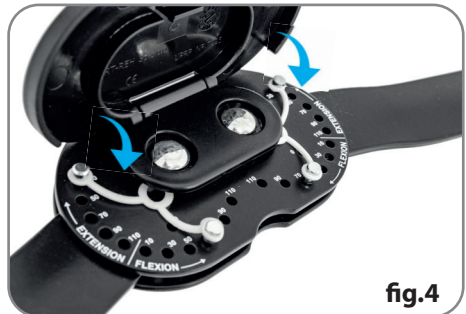


fig.4

1. Open the security flap (**fig.1**)
2. Before positioning the rail, remove all locking rivets placed in the clock
3. Position the brace in the approximate position where we want to limit the **flexion/extension (fig.2)**
4. Lock the rail arms (on both sides) by inserting 4 locking rivets into the appropriate holes (**fig.3**)
5. Close the flap (**fig.4**) and check the correctness of operation and the range of clock movements

THE ANGLE OF FLEXION AND EXTENSION IS SPECIFIED BY THE DOCTOR OR PHYSIOTHERAPIST!

ATTENTION: If the brace is equipped with 2 side splints, adjustment is done on each side splint separately, setting the same angle of flexion and extension on both splints (point 1-4). Side splints do not require maintenance