

1. Ustawić ortezę w przybliżonym położeniu w którym chcemy ograniczyć zgięcie (wyprost).
2. Wkręcić wkręt (wkręty) w odpowiednie miejsca oznaczone na zdjęciu po lewej.

- A- Całkowita blokada w pozycji 0° (wyprostowanej)
- B- Ograniczenie kąta zgięcia w 75°
- C- Ograniczenie kąta wyprost w 15°

UWAGA:
PRZED USTAWIENIEM BLOKADY KĄTA ZGIĘCIA LUB WYPROSTU, ZALECA SIĘ ZAŁOŻYĆ WYRÓB NA KOŃCZYNE.
Szyny boczne nie wymagają konserwacji.


Termin ważności: NIE OKREŚLA SIĘ 2013
Okres gwarancji: 24 MIESIĘCE OD DATY ZAKUPU

Konsultant Med: tel. 508 382 509



Podstawa dopuszczenia do obrotu:
Produkt został zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w
Wyrób klasy I

REH4MAT Sławomir Wroński
ul. Piaski 47, 36-060 Głogów Młp., Polska
tel. +48 16 621 42 20; fax +48 16 621 42 13
e-mail: biuro@reh4mat.com, www.reh4mat.com

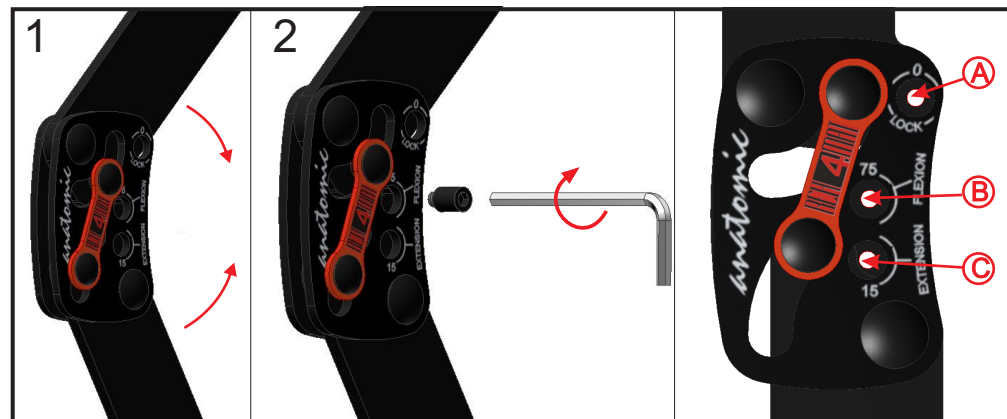

1. Place the support in the position in which you want to stabilize the flection (extension)
2. Place the screws in the holes showed in the picture on the left.

- A- full blockage in the 0 degree position
- B- restriction of the flection angle at 75 degrees
- C- restriction of the extension angle at 15 degrees

ATTENTION:
Put the support on the limb before you fix the angle of extension or flection.
Lateral splints do not require maintenance

2013
Validity date: not determined
Warranty: 24 months from the date of purchase



Admitted on the market: product registered
in the Department of Registration of Healing Products,
Medical Products and Biocidal Products.
Medical product first class

REH4MAT Sławomir Wroński
ul. Piaski 47, 36-060 Głogów Młp., Poland
tel. +48 16 621 42 20; fax +48 16 621 42 13
e-mail: biuro@reh4mat.com, www.reh4mat.com