


KOD KATALOGOWY	AM-OSK-OL/2RA
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-OSK-OL/2RA
CODE	AM-OSK-OL/2RA
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-OSK-OL/2RA

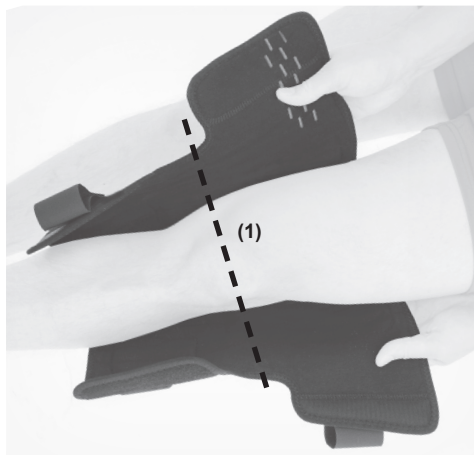


1. PL: Rozepnij ortezę i przyłóż ją do nogi (1) w taki sposób, aby zegary szyny znajdowały się w osi stawu kolanowego.

EN: Unfasten the brace and place it on the leg (1) in such a way that the drop locks are in the axis of the knee joint.




2. PL: Zapnij rzepy według numeracji (2,3).

EN: Fasten the Velcro straps according to the following steps (2,3).

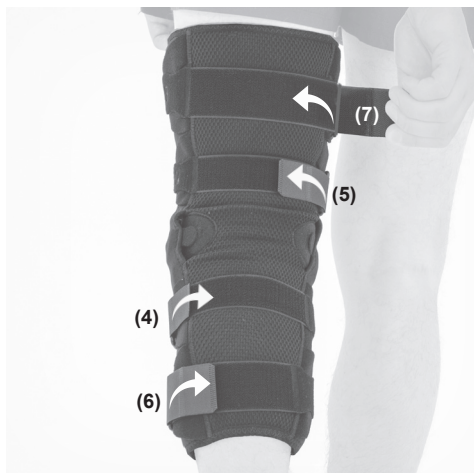

3. PL: Przepleć taśmy przez klamry i zapnij w podanej kolejności (4,5,6,7,8,9,10,11).

EN: Interlace the straps through the buckles and fasten them according to the following steps (4,5,6,7,8,9,10,11).

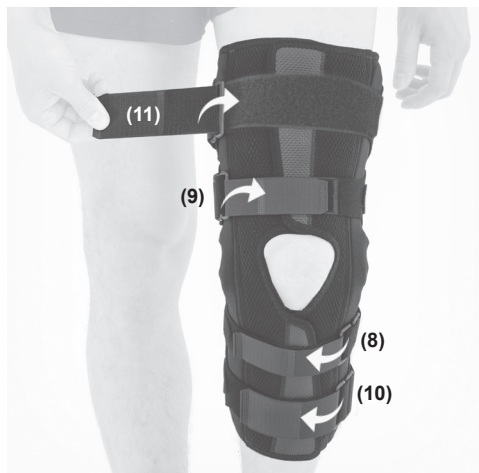

PL: UWAGA! Istnieje możliwość używania ortozy tylko z pasami przednimi.

EN: ATTENTION! It is possible to use the brace only with front straps.



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.