


| | |
|----------------|-------------------------|
| KOD KATALOGOWY | AM-OSK-Z/S-X |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA STAWU KOLANOWEGO |
| MODEL | AM-OSK-Z/S-X |
| | |
| CODE | AM-OSK-Z/S-X |
| TRADE NAME | KNEE ORTHOSIS |
| MODEL | AM-OSK-Z/S-X |



- 1. PL:** Rozepnij ortezę i załóż na nogę w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzępkowym (1).
EN: Unfasten the brace and put on the leg, so that the kneecap is in the patellar donut (1).

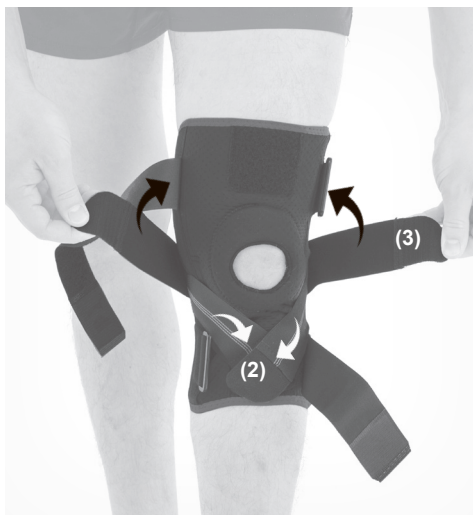

- 2. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję dolnych i górnych pasów krzyżowych i zapnij je na rzepy według podanej kolejności (2,3).
EN: Set the appropriate compression for the lower and upper cross straps and fasten them with Velcro according to the following steps (2,3).

- 3. PL:** Przepleć taśmy (4,5) przez klamkerki i zapnij je na rzepy.
EN: Interlace the straps (4,5) through the buckles and close them with Velcro.



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.