


KOD KATALOGOWY	AS-KX-08
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOLANA
MODEL	ORTEZA KOLANA AS-KX-08
CODE	AS-KX-08
TRADE NAME	KNEE ORTHOSIS
MODEL	KNEE ORTHOSIS AS-KX-08

PL: CZĘŚCI SKŁADOWE ORTEZY:

- A. Rozpięta orteza
- B. Paski
- C. Rzepy


EN: COMPONENTS OF THE BRACE :

- A. Unbuttoned brace
- B. Stripes
- C. Velcros

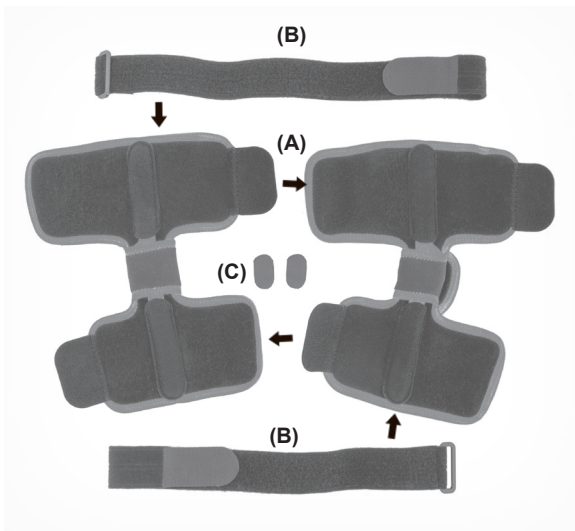


1. PL: Przed zapięciem ortozy zegary powinny być ustawione dokładnie po bokach stawu kolanowego. Regulacji dokonujemy za pomocą tylnych zapięć (1, 2).


EN: Before fastening the brace, the drop locks should be positioned exactly on the sides of the knee joint. Adjustments are made using the rear fasteners (1, 2).

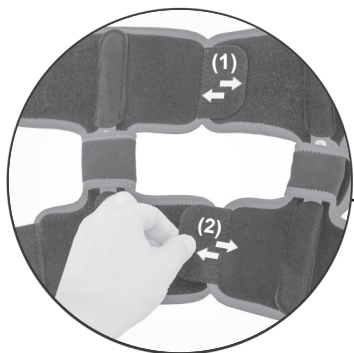

2. PL: Załóż ortezę na nogę i zapnij rzepy według numeracji (3, 4).

EN: Put the BRACE on the leg and fasten the Velcro straps according to the following steps (3, 4).

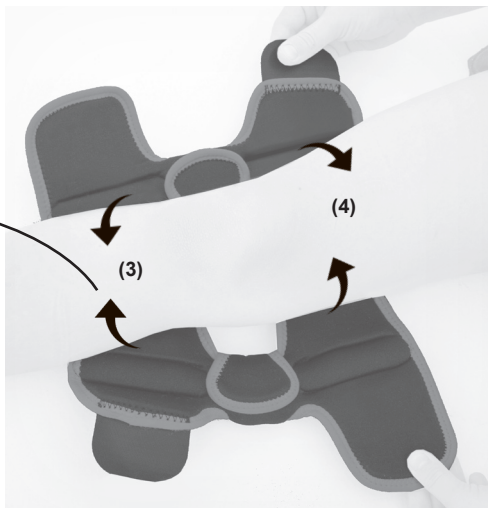

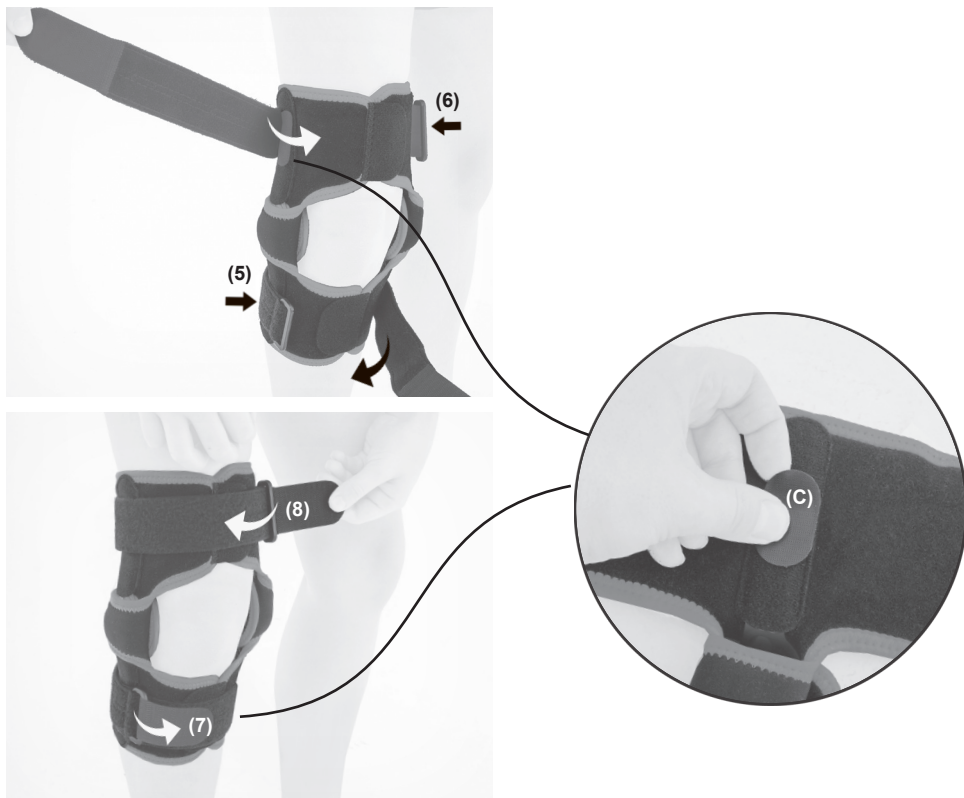

4. PL: Dopnij pasy (5, 6) do ortozy. Po przeciwnej stronie na tunelu szyny przypnij rzepy (C).
Następnie przepleć pasy przez klamerki (7, 8) i zapnij na rzepy.

EN: Fasten the straps (5, 6) to the orthosis. On the opposite side of the rail tunnel, attach the Velcro (C).
Then thread the straps through the buckles (7, 8) and fasten with Velcro.



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.