
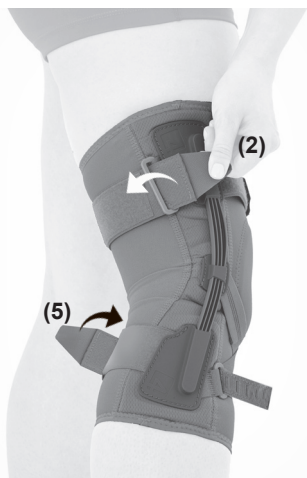


KOD KATALOGOWY	EB-SK/A
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	EB-SK/A
CODE	EB-SK/A
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	EB-SK/A

1. PL: Rozepnij paski, załóż ortezę na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w pierścieniu okółrępkowym (1).

EN: Unbuckle the straps, pull the brace on your leg, so that the kneecap is in the patellar donut (1).

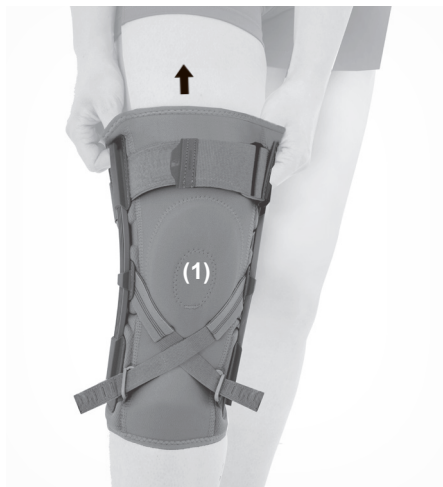

2. PL: Przepleć taśmy przez klamkerki i zapnij w podanej kolejności (2,3,4,5,6).

EN: Interlace the straps through the buckles and fasten them according to the following steps (2,3,4,5,6).



3. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.