



KOD KATALOGOWY	ATTACK 2RA
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ ATTACK 2RA
CODE	ATTACK 2RA
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT ATTACK 2RA

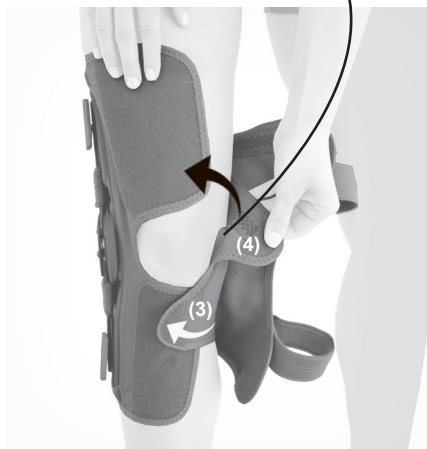

- 1. PL:** Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.

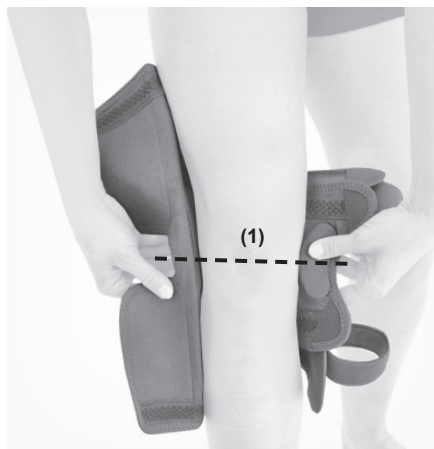

- 2. PL:** Przyłóż ortezę do nogi w taki sposób, aby zegar szyny znajdował się w osi stawu kolanowego (1).

EN: Place the brace on the leg in such a way that the drop lock is in the knee joint axis (1).

- 3. PL:** Ustaw pelotę odciążającą (2) w odpowiednim miejscu i zapnij ortezę na rzepy (3,4).

EN: Place the relief pad (2) in the right place and fasten the Velcro fastener (3,4).

- 4. PL:** Zapnij ortezę na rzepy w podanej kolejności (5,6).
EN: Fasten the Velcro according to the following steps (5,6)



- 5. PL:** Przepleć taśmy przez klamry i zapnij na rzepy w podanej kolejności (7,8).
EN: Interlace the straps through the buckles and fasten the Velcros according to the following steps (7,8).



- 6. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.