

KOD KATALOGOWY	AM-OSK-ZJ/3
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-OSK-ZJ/3
CODE	AM-OSK-ZJ/3
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-OSK-ZJ/3




1. **PL:** Załóż ortezę na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okolorzepakowym.

EN: Place the brace on the leg and pull up to keep the kneecap in the patellar hole.



2. **PL:** Zapnij rzepy według kolejności (1) i (2).

EN: Fasten the Velcros closures according to the following steps (1) and (2).

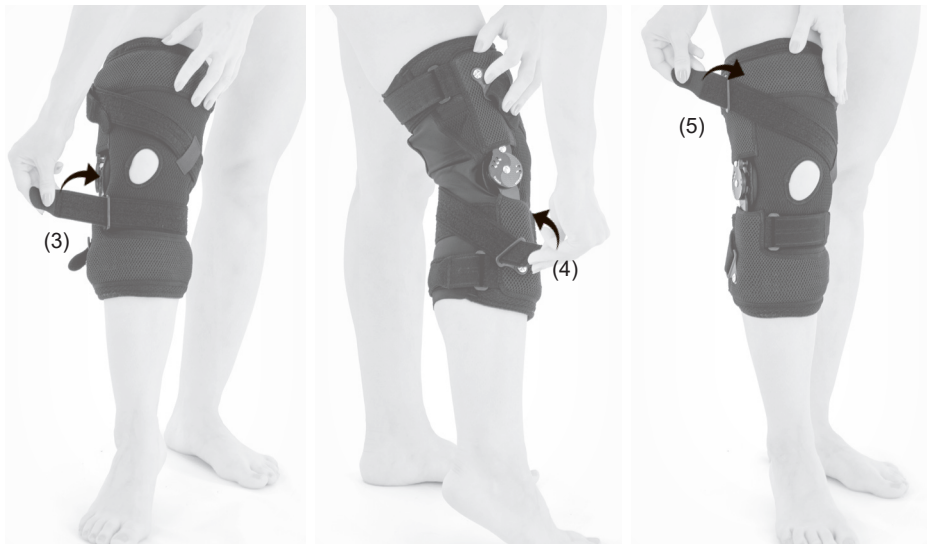

3. PL: Zapnij rzepy według kolejności (3) (4) (5).

EN: Fasten the Velcros closures according to the following steps (3) (4) (5).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.