


KOD KATALOGOWY	EB-SK/1R
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	EB-SK/1R
CODE	EB-SK/1R
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	EB-SK/1R



- 1. PL:** Załóż ortezę na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w pierścieniu okolorzepakowym.
EN: Place the brace on the leg and pull up to keep the kneecap in the patellar donut.



- 2. PL:** Zapnij pasy rzepkowe (1,2) według wskazanej kolejności.
EN: Fasten the Velcro straps (1,2) according to the following steps.

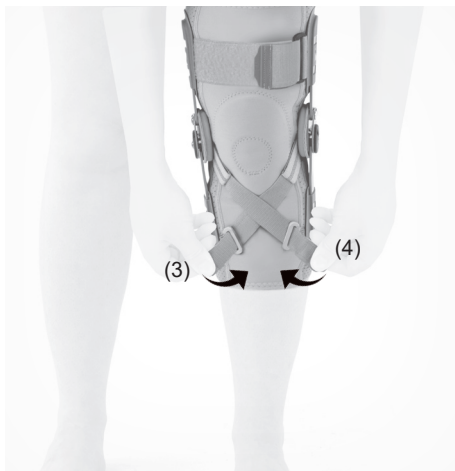

- 3. PL:** Zapnij pasy rzepkowe (3,4 i 5) według wskazanej kolejności.
EN: Fasten the Velcro straps (3,4 and 5) according to the following steps.





4. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.