



KOD KATALOGOWY	AM-SB-06
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA BIODRA
MODEL	AM-SB-06
CODE	AM-SB-06
TRADE NAME	HIP ORTHOSIS
MODEL	AM-SB-06

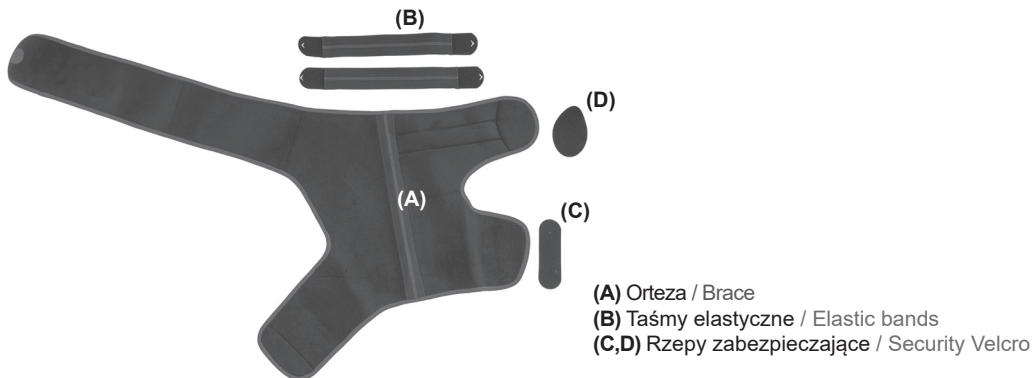

- 1. PL:** Rozepnij orteżę i odczep rzepy zabezpieczające (C,D).  
**EN:** Unfasten the brace and unhook the securing straps (C,D).

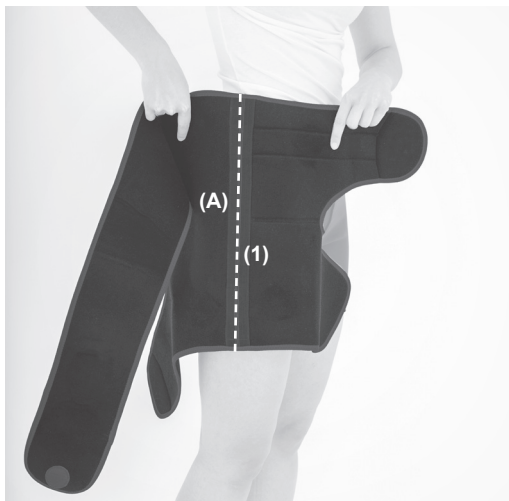


- 2. PL:** Przyłóż orteżę (A) do nogi w taki sposób, aby amortyzator (1) przebiegał wzdłuż kończyny. Tylko prawidłowo założona orteza pozostaje w osi stawu biodrowego i przylega równomiernie do całej kończyny.

**EN:** Put the brace (A) on the leg in such a way that the leaf spring hinge (1) runs along the leg. Only a correctly placed brace remains in the axis of the hip joint and adheres evenly to the entire limb.




- 3. PL:** Zapnij pas biodrowy na rzepy (2,3) ustawiając odpowiednią kompresję.

**EN:** Fasten the waist belt with Velcros (2,3) setting the appropriate compression.

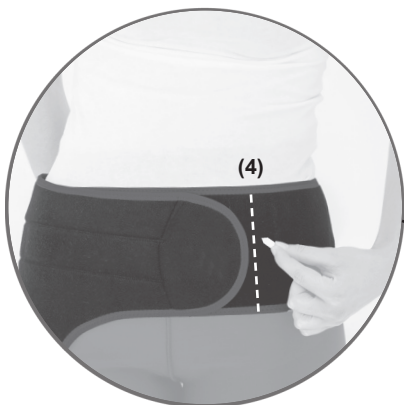



- 4. PL:** Zaznacz koniec zapięcia (4).  
**EN:** Mark the end of the brace (4).

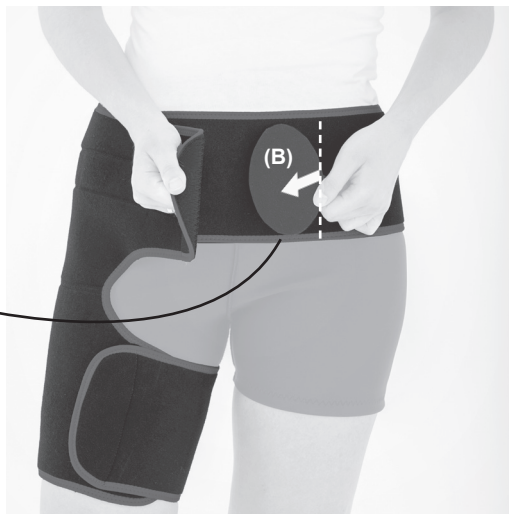

- 5. PL:** Przypnij rzep zabezpieczający (B) w zaznaczonym miejscu i ponownie zapnij pas.  
**EN:** Fasten the securing Velcro (B) in the marked place and fasten the belt again.



- 6. PL:** Zapnij pas udowy na rzep (5) ustawiając odpowiednią kompresję.  
**EN:** Fasten the thigh strap with Velcro (5) setting the appropriate compression.

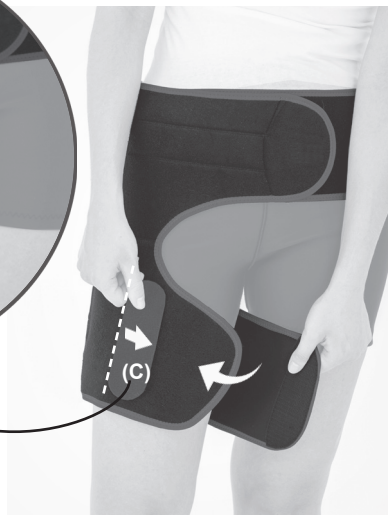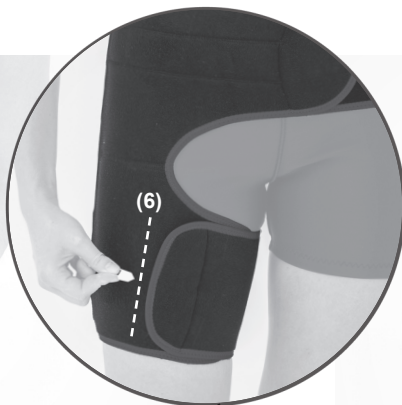

- 7. PL:** Zaznacz koniec zapięcia (6), przypnij rzep zabezpieczający (C) w zaznaczonym miejscu i ponownie zapnij pas na rzep.  
**EN:** Mark the end of the fastener (6), fasten the securing velcro (C) in the marked place and fasten the Velcro strap again.



**8. PL:** Przypnij taśmy elastyczne (B) na rzepy w taki sposób, aby krzyżowały się na amortyzatorze i w odpowiedni sposób stabilizowały go na kończynie.

**EN:** Fasten the elastic bands (B) with Velcro in such a way that they cross over the shock absorber and properly stabilize it on the limb.



**9. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.