


KOD KATALOGOWY	AM-OSS-25
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AM-OSS-25
CODE	AM-OSS-25
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT AM-OSS-25



- 1. PL:** Rozepnij ortezę.  
**EN:** Unfasten the brace.



- 2. PL:** Załóż ortezę na nogę w taki sposób, aby pięta znajdowała się w otworze (1).  
**EN:** Put on the brace, so that the heel is in the special opening (1).

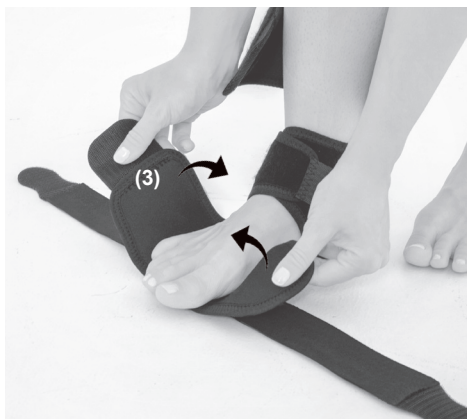

- 3. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzepy (2,3) w podanej kolejności.  
**EN:** Set the compression and fasten the Velcro (2,3) in the given order.



- 4. PL:** Zapnij górną opaskę na rzep (4).  
**EN:** Close the top Velcro band (4).



- 5. PL:** Zapnij ósemkowe pasy dociągowe (5,6). Mocniejsze naciągnięcie pasów spowoduje silniejszą elewację przodostopia.  
**EN:** Fasten the figure 8 straps (5,6). Once you pull harder the figure 8 straps, you will receive the better forefoot elevation.

- PL:** Uwaga! Istnieje możliwość zapięcia pasów dociągowych bez ich krzyżowania.  
**EN:** Attention! It is possible to fasten the tension belts without crossing them.



- 6. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.