


KOD KATALOGOWY	OSS-OS-02/CCA
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AM-OSS-24
CODE	OSS-OS-02/CCA
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT AM-OSS-24



- 1. PL:** Przed założeniem ortozy podciągnij tarczę zegara (1) do góry i poluzuj system BOA®.
EN: Before using the brace, pull the dial (1) up and loosen the BOA® Fit System.



- 2. PL:** Rozepnij ortezę, załóż na nogę i zapnij rzep (2).
EN: Unfasten the brace, place it on the leg and fasten the Velcro closures (2).

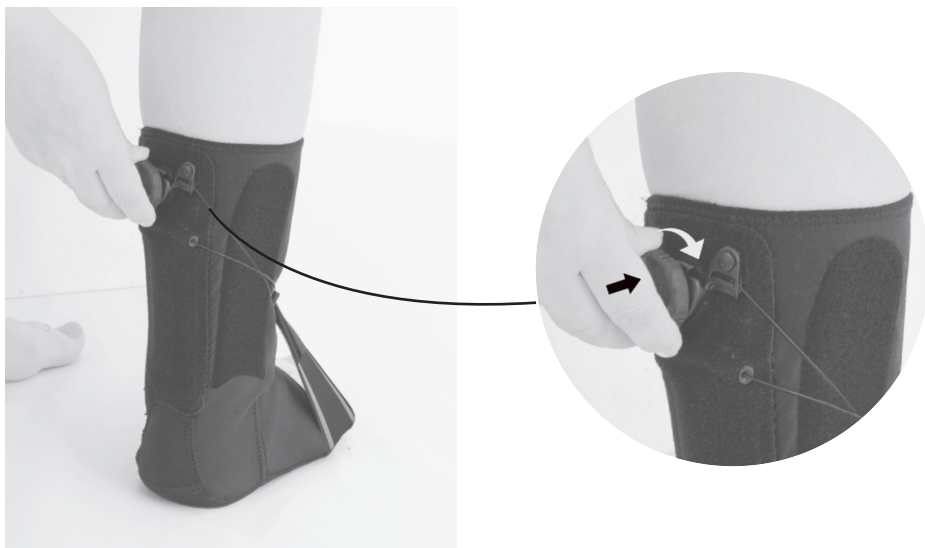

3. PL: Za pomocą systemu BOA® ustaw odpowiednią kompresję.

UWAGA! Im mocniejsze napięcie linki, tym większa elewacja przodostopia.

EN: Adjust the required compression with the BOA® Fit System.

ATTENTION! The stronger compression is, the stronger forefoot elevation you receive.



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.