

KOD KATALOGOWY	EB-SS
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	EB-SS
CODE	EB-SS
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	EB-SS





- 1. PL:** Rozepnij ortezę i załóż na nogę.
EN: Unfasten the brace and put it on the leg.



- 2. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzep (1).
EN: Set the proper compression and fasten the Velcro (1).



- 3. PL:** Opleć taśmę gumową (2,3) dookoła nogi według wskazanego kierunku i ustaw odpowiednią kompresję.
EN: Wrap the rubber band (2,3) around the leg in the indicated direction and set the appropriate compression.

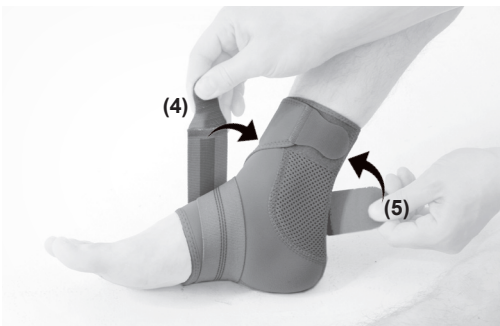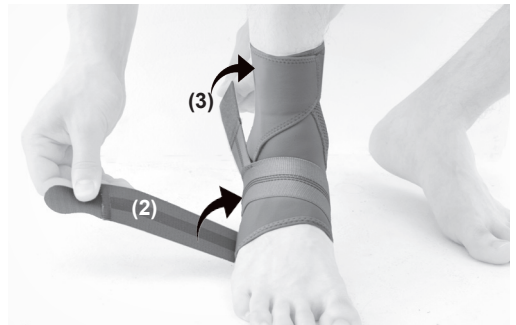

- 4. PL:** Zapnij rzepy (4,5).
EN: Fasten the Velcros (4,5).





5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.