



KOD KATALOGOWY	OKG-06
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ OKG-06
CODE	OKG-06
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT OKG-06

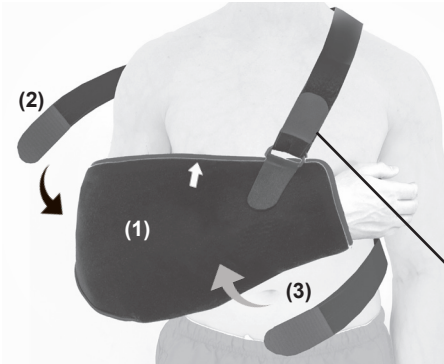

1. PL: Załóż temblak (1) w odpowiedniej pozycji terapeutycznej (90° lub 45°) i zapnij pasy na rzep według numeracji (2, 3).

EN: Put the sling (1) on the correct therapeutic (90° or 45°) position and fasten the Velcro straps according to the following steps (2, 3).

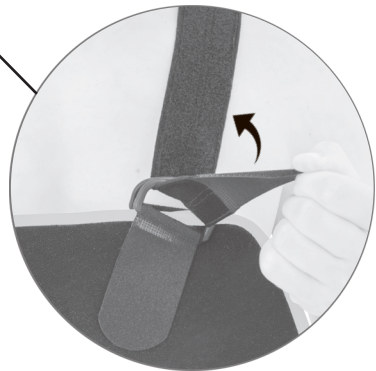

2. PL: Ustaw odpowiednią długość pasa barkowego.

EN: Adjust the required length of the shoulder strap.



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.