


KOD KATALOGOWY	OKG-22
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	OKG-22
CODE	OKG-22
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	OKG-22

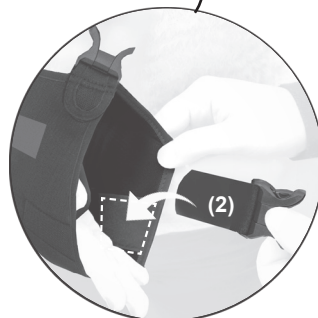


1. PL: Załóż ortezę na rękę. Umieść kciuk w specjalnej pętlice (1), aby zapobiec wysuwaniu się ręki. Przypnij klamerkę z rzepem w miejscu zaznaczonym na zdjęcie (2).

EN: Put the arm to the sling. Place your thumb in the thumb loop (1) for preventing sliding the forearm. Attach the Velcro clip according to the picture (2).





2. PL: Przelóż pasek przez ramię i zapnij klamerkę (3). Ostonę paska (4) umieść przy szyi.

EN: Put the belt over the shoulder and fasten the buckle (3). Place the belt cover (4) on your neck.

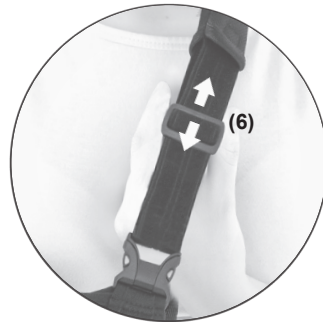

3. PL: Ustaw odpowiednią długość pasa barkowego (5 i 6).

EN: Adjust the required length of the shoulder strap (5 and 6).

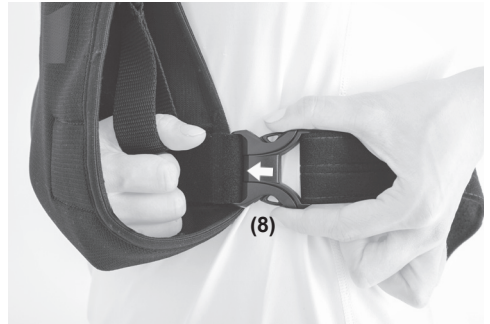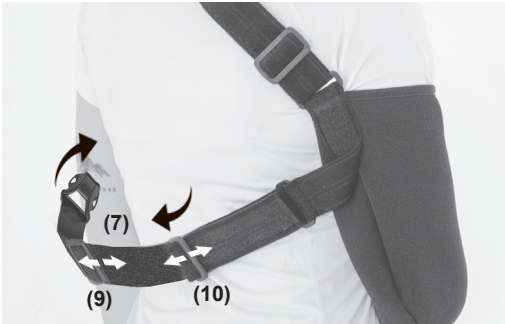

4. PL: Przełóż pasek przez plecy (7) i zapnij klamrę (8). Za pomocą regulatorów (9,10) dopasuj długość taśmy.

EN: Put the belt over the back (7) and fasten the buckle (8). Use the buckles (9,10) to adjust the length of the tape.



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.