

KOD KATALOGOWY	AM-OSN-U-22
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ AM-OSN-U-22
CODE	AM-OSN-U-22
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT AM-OSN-U-22




1. **PL:** Załóż ortezę na rękę.
EN: Put on the orthosis on the hand.



2. **PL:** Opleć nadgarstek według wskazanego kierunku i zapnij rzep (1).
EN: Wrap your wrist in the indicated direction and fasten with Velcro (1).

(1)

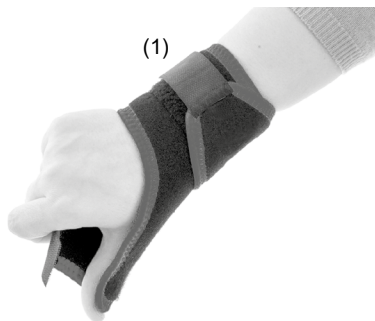

(2)

3. **PL:** Zapnij rzep obwodowy kciuka (2).
EN: Fasten the thumb wrap-around strap (2).



4. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.