


KOD KATALOGOWY	OKG-10
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ OKG-10
CODE	OKG-10
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT OKG-10

1. **PL:** Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.

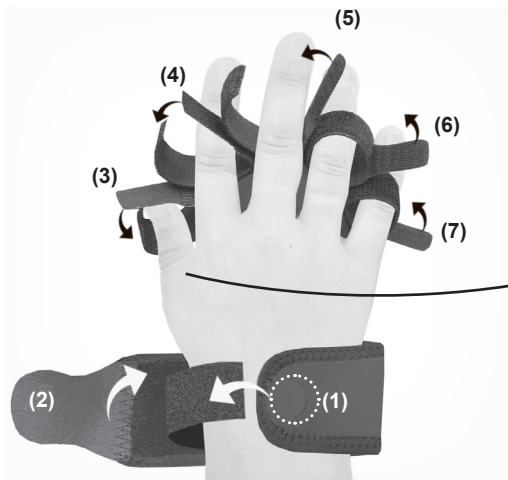

2. **PL:** Wyjmij usztywnienie (A) i dopasuj jego profil do ręki.
EN: Take the splint out of the brace (A) and shape it to your hand.



Uwaga!

Jeśli istnieje potrzeba, odetnij zbędną długość pasków.

Attention!

If necessary, cut off the needless part of the straps.

3. PL: Umieść rękę w orlezie i zapnij rzepy w odpowiedniej kolejności (1,2,3,4,5,6,7).

EN: Place your hand in the brace and fasten the Velcro in the following order (1,2,3,4,5,6,7).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.