


KOD KATALOGOWY	OKG-14
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ OKG-14
CODE	OKG-14
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT OKG-14

PL: (A) Aluminiowy stelaż z możliwością formowania
(B) Element miękki ortozy

EN: (A) Aluminum frame with the possibility of forming
(B) Soft part of the brace

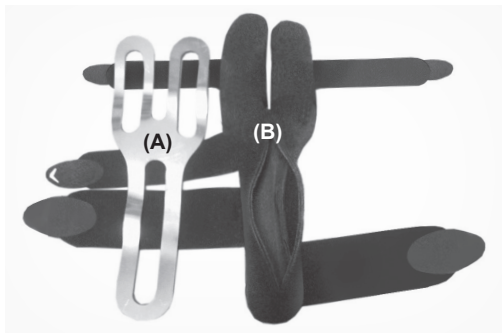

1. PL: Dopasuj ortezę do ręki.
EN: Adjust the brace to the hand.



2. PL: Zapnij taśmy nadgarstka (1) i przedramienia (2) na rzep.
EN: Fasten the wrist (1) and forearm tapes (2) with Velcro.



3. PL: Zapnij taśmy palców (3 i 4) i śródrcza (5) na rzep.
EN: Fasten the fingers (3 i 4) and metacarpal (5) straps with Velcro.





4. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.