



KOD KATALOGOWY	AM-OSN-U-01/CCA
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	AM-OSN-U-01/CCA
CODE	AM-OSN-U-01/CCA
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-OSN-U-01/CCA

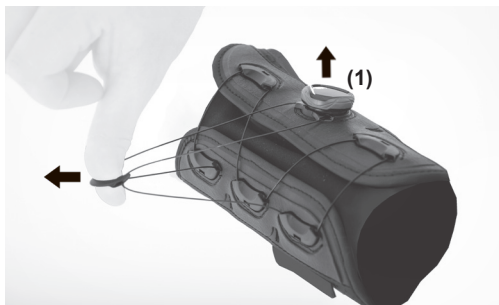


- 1. PL:** Przed założeniem ortozy podciągnij tarczę zegara (1) do góry i poluzuj system BOA®.  
**EN:** Before putting on the brace, pull the dial (1) up and loosen the BOA® system.



- 2. PL:** Załóż ortezę na rękę (2).  
**EN:** Put the brace on the wrist (1).

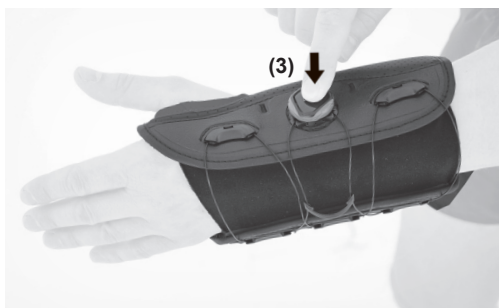

- 3. PL:** Wciśnij tarczę zegara (3) i za pomocą systemu BOA® ustaw odpowiednią kompresję (4).  
**EN:** Press the dial (3) and use the BOA® system to set the appropriate level of compression (4).

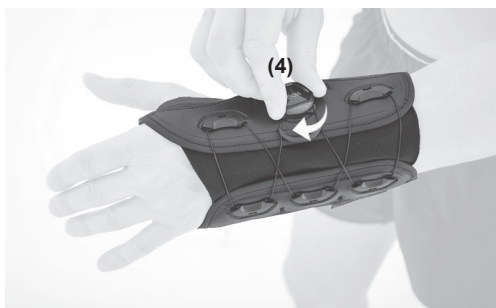

- 4. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.

