




KOD KATALOGOWY	AM-OSN-U-09
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	ORTEZA NADGARSTKA AM-OSN-U-09
CODE	AM-OSN-U-09
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	WRIST ORTHOSIS AM-OSN-U-09

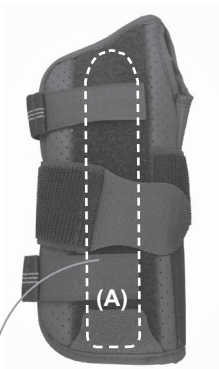



A. PL: Stabilizacja ręki prawej
EN: Stabilization of the right hand

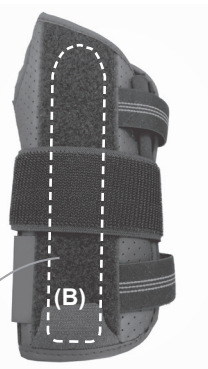

B. PL: Stabilizacja ręki lewej
EN: Stabilization of the left hand

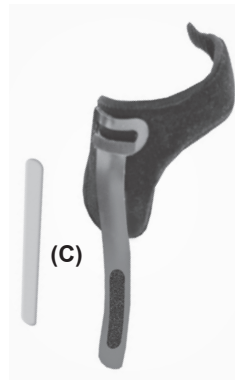

C. PL: Usztywnienie kciuka z listwą zabezpieczającą rzep
EN: Thumb stiffening with Velcro fastener

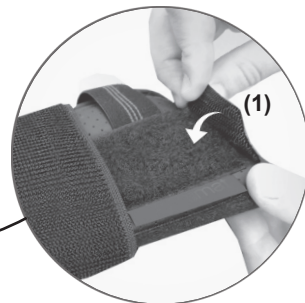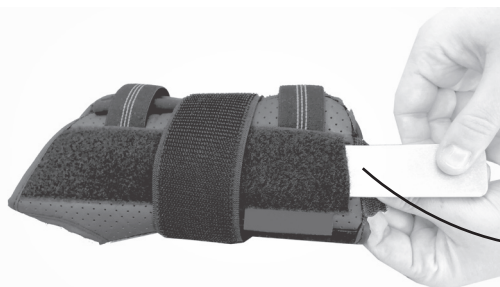

1. PL: Umieścić szynę w odpowiednim tunelu (A) lub (B) i zapnij tunel na rzep (1).
EN: Place the splint in the appropriate tunnel (A) or (B) and close the Velcro fastener (1).



2. PL: Aby zamontować usztywnienie kciuka (C), należy zabezpieczyć rzep plastikową listwą (2) i wraz z nią włożyć usztywnienie do tunelu (3).
EN: To attach the thumb stiffening (C), secure the Velcro with a plastic strip (2) and insert the stiffening into the tunnel with it (3).




- 3. PL:** Rozepnij ortezę, załóż ją na rękę (4) i zapnij paski na rzepy w podanej kolejności (5,6,7).
EN: Unfasten the orthosis, put it on your hand (4) and close the Velcro straps in the following order (5,6,7).




- 4. PL:** Dopasuj usztywnienie do kciuka (8).
EN: Adjust the stiffening to the thumb (8).



- 5. PL:** Wymij listwę z tunelu (9).
EN: Remove the strip from the tunnel (9).

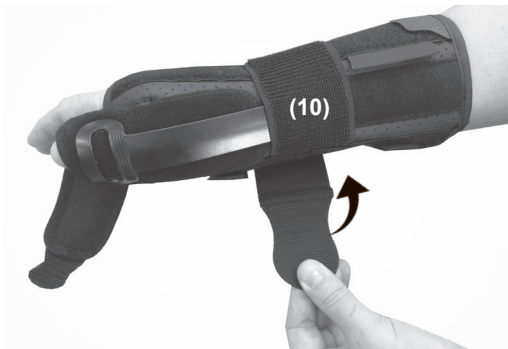

- 6. PL:** Opleć taśmę elastyczną (10) wokół nadgarstka i zapnij ją na rzep.
EN: Place the elastic band (10) around your wrist and close it with Velcro.

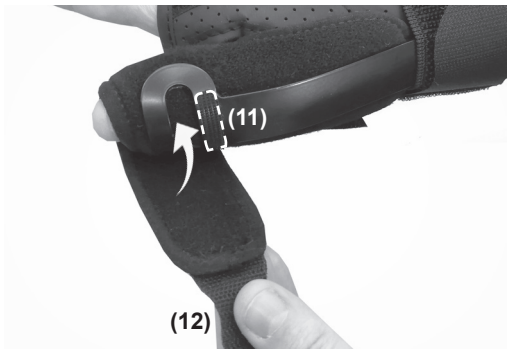

- 7. PL:** Zapnij stabilizator kciuka na rzepy (11 i 12).
EN: Close the thumb stiffening with Velcro (11 and 12).



- 8. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.



- 9. PL:** UWAGA! Jeśli nie ma potrzeby, wyrób można stosować bez stabilizacji kciuka.
EN: ATTENTION! If not necessary, the product can be used without the thumb stiffening.