


KOD KATALOGOWY	EB-N-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	EB-N-01
CODE	EB-N-01
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	EB-N-01



- 1. PL:** Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.

- 2. PL:** Załóż ortezę na rękę.
Uwaga! Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie dopasować wszystkie usztywnienia zainstalowane w ortezie w celu uzyskania pożądanego ustawienia zabezpieczonego stawu lub innej części ciała.

EN: Put the brace on your hand.
Attention! Before putting the brace on a patient, it is necessary to precisely adjust all the elements installed in the product in order to obtain the desired positioning of the secured joint or other part of the body.

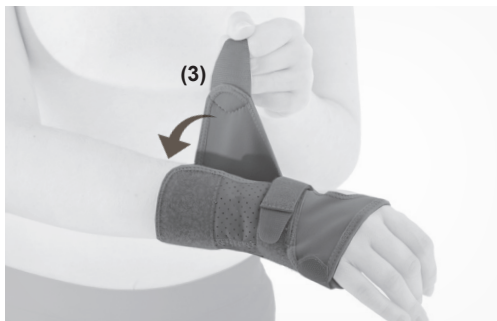

- 3. PL:** Przelóż taśmę (1) przez otwór, ustaw odpowiednią kompresję i zapnij na rzep (2).
EN: Pass the strap (1) through the hole, set the appropriate compression and fasten with Velcro (2).

- 4. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzep (3).
EN: Set the proper compression and fasten the Velcro (3).



- 5. PL:** Dopasuj ortezę do śródrečca i zapnij rzep (4).
EN: Adjust the brace to the metacarpus and close the Velcro fastener (4).



- 6. PL:** Gotowy wyr6b.
EN: Product is ready to use.