


KOD KATALOGOWY	EB-N-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	EB-N-02
CODE	EB-N-02
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	EB-N-02

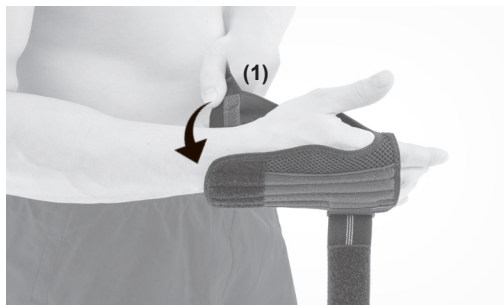

1. PL: Rozepnij ortezę i załóż na rękę.
Uwaga! Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie dopasować wszystkie usztywnienia zainstalowane w ortezie w celu uzyskania pożądanego ustawienia zabezpieczonego stawu lub innej części ciała.


EN: Unfasten the brace and put it on the hand.
Attention! Before putting the brace on a patient, it is necessary to precisely adjust all the elements installed in the product in order to obtain the desired positioning of the secured joint or other part of the body.

2. PL: Zapnij ortezę w nadgarstku na rzep (1).
EN: Fasten the wrist brace with Velcro (1).



3. PL: Ustaw odpowiednią kompresję ortezy w śródreźcu (2) podciągając przeplecioną przez klamrę (3) gumkę (4). Opleć rękę według wskazanego kierunku.

EN: Set the appropriate compression of the brace in the metacarpus (2) by pulling up the elastic band (4) entwined by the buckle (3). Wrap the hand in the direction indicated.

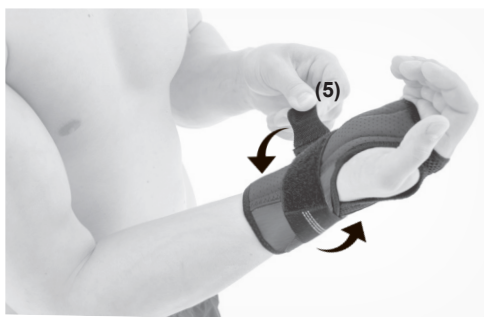

4. PL: Zapnij rzep (5).
EN: Fasten with Velcro (5).



- 5. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.