


KOD KATALOGOWY	AM-OSN-U-14
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	ORTEZA NADGARSTKA AM-OSN-U-14
CODE	AM-OSN-U-14
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	WRIST ORTHOSIS AM-OSN-U-14

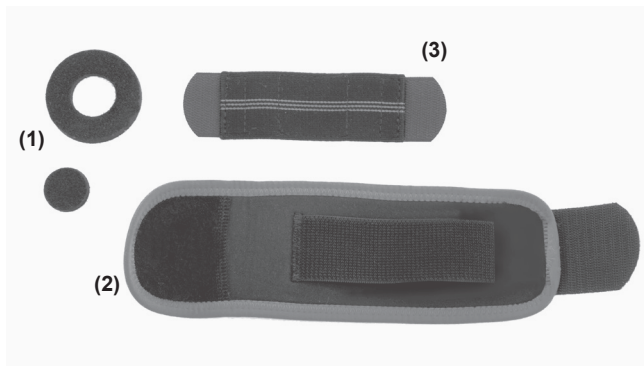


PL: ELEMENTY ORTEZY

1. Pelota z wymiowanym środkiem.
2. Orteza.
3. Kompresyjny pas gumowy.

EN: THE BRACE ELEMENTS

1. Pad with removable part.
2. The Brace.
3. Compressive rubber belt.

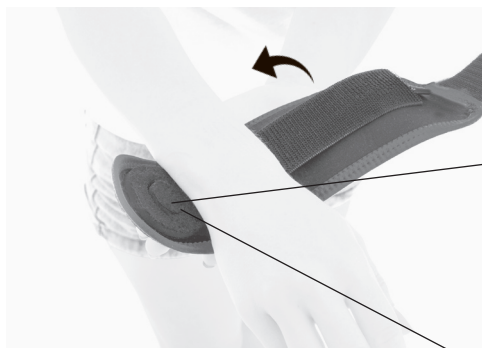


1. **PL:** Załóż ortezę na nadgarstek tak, aby pelota odciążająca wyrostek rylcowaty kości łokciowej znajdowała się w odpowiednim miejscu.
EN: Place the brace on the wrist and remember to place the circular pad on the refer styloid process.

2. **PL:** Jeśli jest taka potrzeba wyjmij z peloty środkową część.
EN: If it is necessary remove the middle part of the pad.



3. **PL:** Przepleść taśmę wokół nadgarstka i zapnij rzep.
EN: Wrap the strap around the wrist and fasten the Velcro.

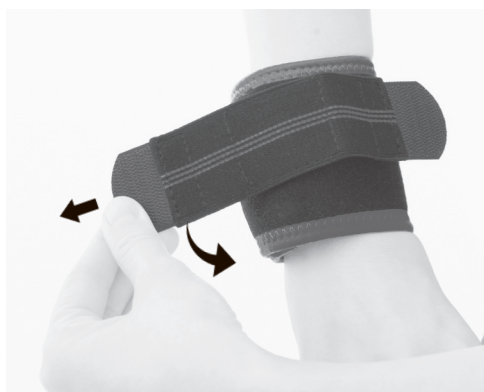

4. **PL:** Przypnij gumę w miejscu peloty i zapnij rzep ustawiając odpowiednią kompresję.
EN: Attach the rubber strap and adjust the required compression.



- 5. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.