


KOD KATALOGOWY	OKG-17
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	OKG-17
CODE	OKG-17
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	OKG-17

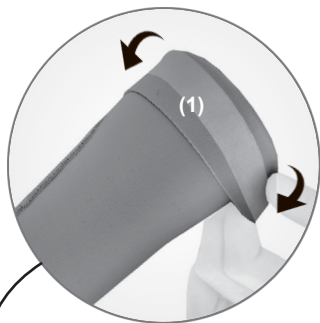


**1. PL:** Odwiń górny element ortezy w taki sposób, aby cała szerokość przedniego paska silikonowego (1) znalazła się na zewnątrz ortezy.

**EN:** Unwrap the upper part of the brace, so that the entire width of the front silicone strap (1) is outside the brace.



**2. PL:** Załóż ortezę na rękę i podciągnij do góry w taki sposób, aby kciuk znajdował się w otworze (2). Następnie odwiń górny mankiet, aby pasek silikonowy znalazł się na skórze.

**EN:** Place the brace on the hand and pull up so that your thumb is in the hole (2). Then unfold the upper part of the brace, so that the silicone strap is on the skin.

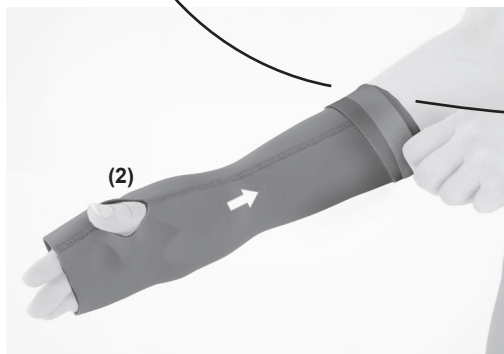

**3. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.

