
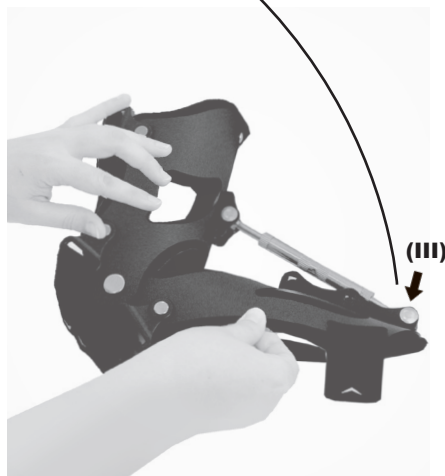
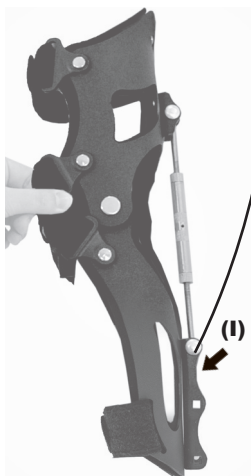
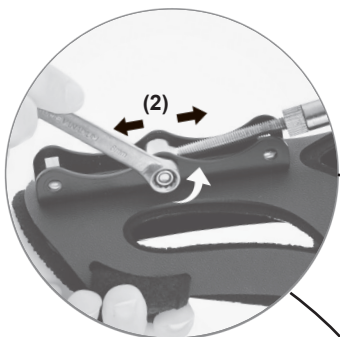


KOD KATALOGOWY	MS-L-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA ŁOKCIA
MODEL	ORTEZA ŁOKCIA MS-L-01
CODE	MS-L-01
TRADE NAME	ELBOW ORTHOSIS
MODEL	ELBOW ORTHOSIS MS-L-01

1. **PL:** Rozepnij paski w ortezie (1).
EN: Unfasten the straps of the brace (1).

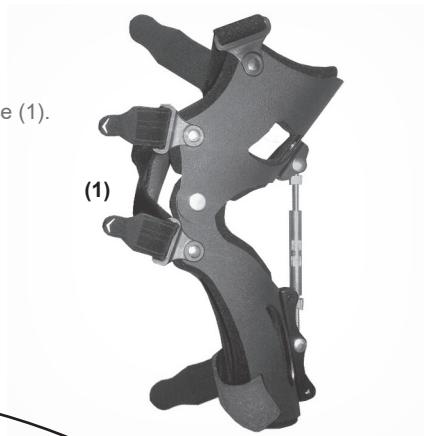


2. **PL:** Za pomocą kluczyka (2) przełóż śruby mocujące w odpowiedni otwór i ustaw zakres kąta zgięcia lub wyprostu określony przez lekarza prowadzącego.
EN: Using the key (2), insert the mounting screws into the appropriate hole and set the appropriate range of the motion determined by the doctor or physiotherapist.


(I)
0° - 40°

(II)
40° - 64°


(III)
64° - 90°

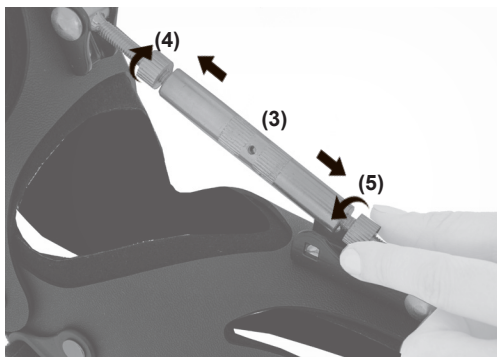



- 3. PL:** Odblokuj regulator (3) przy pomocy nakrętek (4,5).
EN: Unlock the regulator (3) using the nuts (4,5).

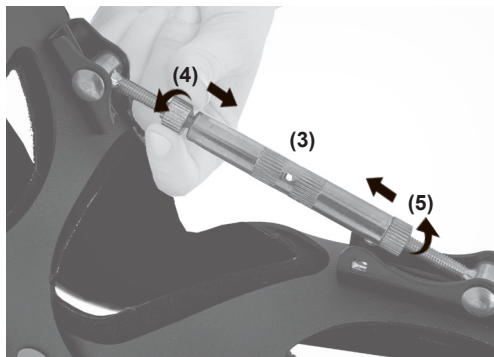


- 4. PL:** Aby zablokować ustawiony wcześniej kąt regulatora (3), zakręć nakrętki (4,5).
EN: To lock the previously set angle (3), tighten the nuts (4,5).

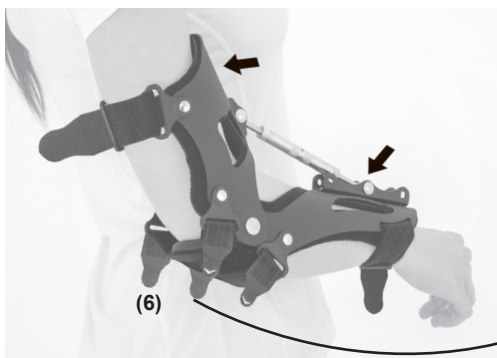

- 5. PL:** Umieść rękę w ortezie (6) w taki sposób, aby łokieć znajdował się we wgłębieniu peloty silikonowej (7).
EN: Put your arm in the brace (6), so that the elbow is placed on the silicone pad (7).

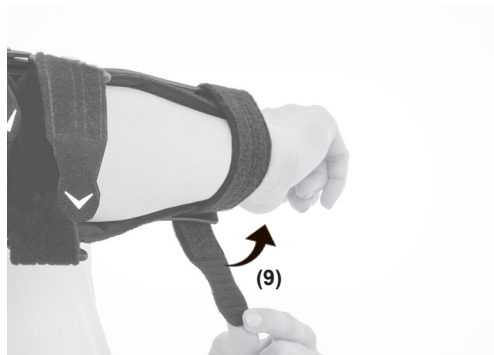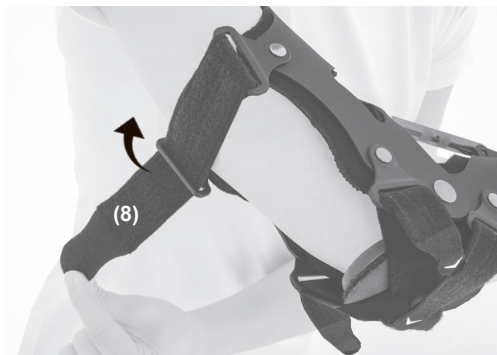

- 6. PL:** Zapnij taśmę ramienia (8) i przedramienia (9) na rzep.
EN: Fasten the arm (8) and forearm (9) straps with Velcro.

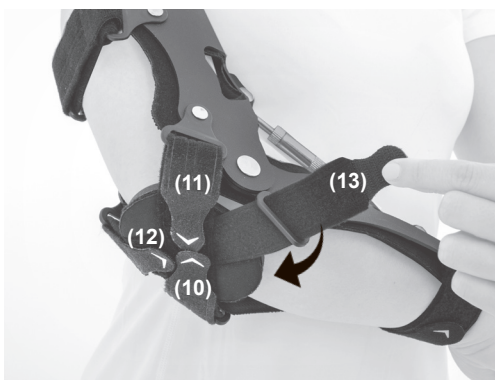

7. PL: Zapnij paski stabilizujące łokieć (10,11,12,13).

EN: Fasten the elbow straps with Velcro (10,11,12,13).

PL: UWAGA! Jeżeli istnieje potrzeba, skoryguj ustawienie kąta według punktu 3 i 4.

EN: ATTENTION! If necessary, correct the angle according to steps 3 and 4.



8. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.