


KOD KATALOGOWY	OKG-09
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ OKG-09
CODE	OKG-09
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT OKG-09



- 1. PL:** Załóż ortezę na rękę i dopasuj obwód w taki sposób aby szyny ortozy przebiegały wzdłuż kłykci kości ramiennej.
EN: Put the brace on your elbow, remember to place the lateral splints in the condylus humerus area

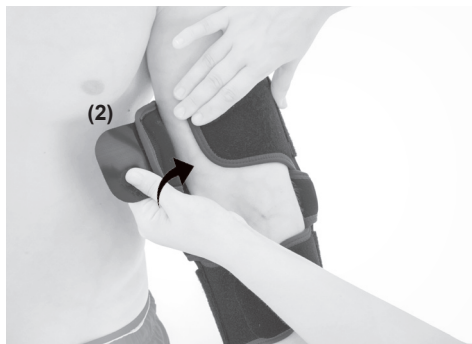

- 2. PL:** Zapnij przednie zapięcia (1) i (2).
EN: Fasten the front closers (1) and (2).



3. PL: Zamocuj paski z klamerkami do szyny ortezy (1), przepleć paski przez klamerki (2) i zapnij rzep według podanej kolejności (3,4).

EN: Fasten the straps with Velcro buckles (1), interlace the lower strap through the buckle (2) and fasten the Velcro closures according to the following steps (3,4).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.