


KOD KATALOGOWY	AS-L
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA ŁOKCIA
MODEL	ORTEZA ŁOKCIA AS-L
CODE	AS-L
TRADE NAME	ELBOW ORTHOSIS
MODEL	ELBOW ORTHOSIS AS-L

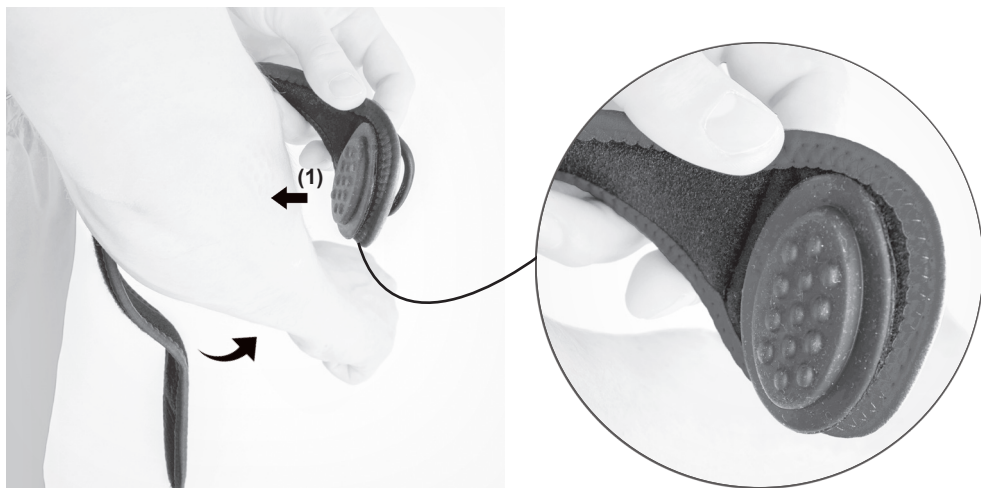

1. PL: Rozepnij ortezę i umieść ortezę na kończynie, tak aby element silikonowy w odpowiedni sposób odciążał przyczep prostowników (1).

EN: Unfasten the brace and put it on your forearm, so that the silicone pad is placed in the painful area (1).



2. PL: Przepięć pasek przez klamrę (2), ustaw odpowiednią kompresję i zapnij na rzep (3).

EN: Interlace the strap through the buckle (2), set proper compression and fasten the Velcro (3).



3. PL: Gotowy produkt.

EN: Product is ready to use.