

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| KOD KATALOGOWY | AS-PL                |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA ŁOKCIA        |
| MODEL          | ORTEZA ŁOKCIA AS-PL  |
|                |                      |
| CODE           | AS-PL                |
| TRADE NAME     | ELBOW ORTHOSIS       |
| MODEL          | ELBOW ORTHOSIS AS-PL |



- 1. PL:** Umieść ortezę na kończynie, tak aby element silikonowy znajdował się w bolącym miejscu.  
**EN:** Place the brace and it's silicone part in the painful area.



- 2. PL:** Przepleć pasek przez klamrę i zapnij na rzep.  
**EN:** Interlace the strap through the buckle and fasten the Velcro.
- 3. PL:** Gotowy produkt.  
**EN:** Product is ready to use.