


| | |
|----------------|--------------------------------|
| KOD KATALOGOWY | OKG-08 |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| MODEL | ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ OKG-08 |
| CODE | OKG-08 |
| TRADE NAME | UPPER-EXTREMITY SUPPORT |
| MODEL | UPPER-EXTREMITY SUPPORT OKG-08 |

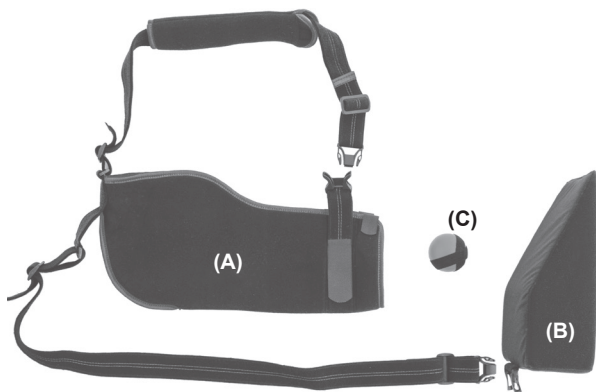

PL: Elementy składowe ortezy:

- (A) Rękaw
- (B) Poduszka
- (C) Piłeczka


EN: Components of the brace:

- (A) Sling
- (B) Pillow
- (C) Ball

- 1. PL:** Umieść rękę w rękawie (A).
EN: Place your hand in the sling (A).



- 2. PL:** Przelóż taśmę (1) przez szyję i zapnij klamrę (2).
EN: Place the strap (1) around the neck and fasten the buckle (2).

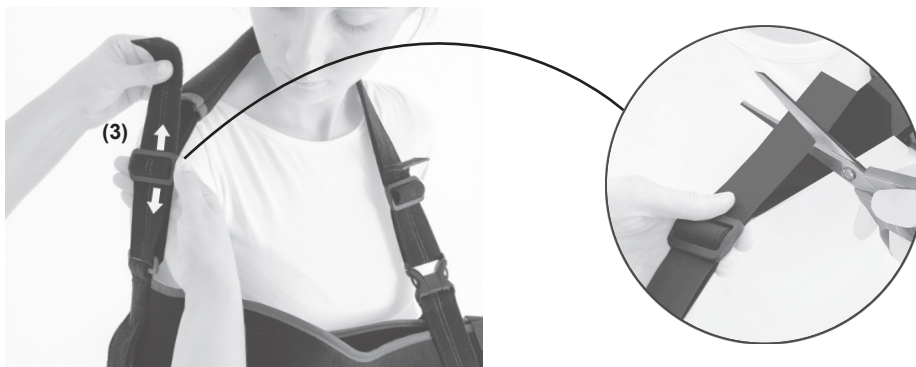


3. PL: Za pomocą regulatora (3) ustaw odpowiednią długość taśmy. Jeśli jest taka potrzeba odetnij nadmiar taśmy.

EN: Adjust the length of the strap (3) with the guides. If necessary, cut off any excess tapes.




4. PL: Odetnij osłonę z rzepami (4) od taśmy i umieść ją w odpowiednim miejscu.

EN: Detach the Velcro cover (4) from the strap and place it in the appropriate place.

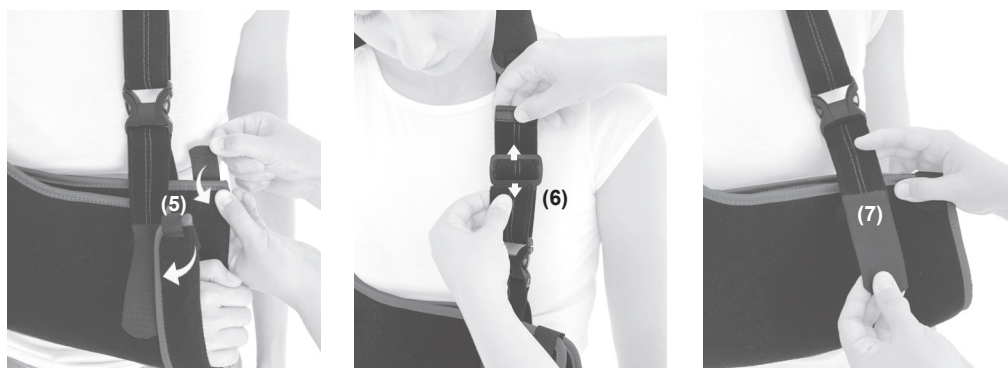


5. PL: Jeśli istnieje potrzeba skrócić rękaw za pomocą rzepów (5) odwijając go na zewnątrz, skoryguj długość taśmy (6) i ustaw odpowiedni kąt klamerki (7).


EN: If there is a need, shorten the sleeve with Velcro (5) by folding it outwards, correct the length of the strap (6) and adjust the angle of the buckle (7).

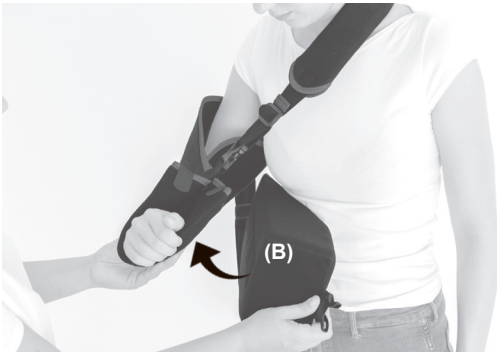


- 6. PL:** Przypnij poduszkę z rzepem (B) do rękawa w odpowiednim miejscu.
EN: Attach the pillow with Velcro (B) to the sleeve in the right place.

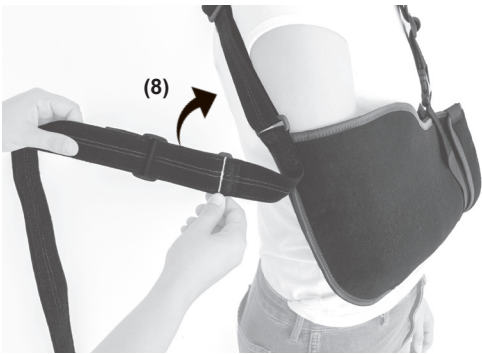

- 7. PL:** Przelóż taśmę z klamerką (8) przez plecy i przypnij ją z przodu do poduszki.
EN: Place the strap with the buckle (8) over the back and attach it to the front of the pillow.

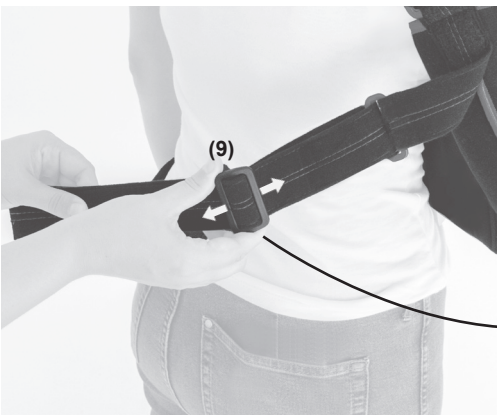

- 8. PL:** Dopasuj długość taśmy do obwodu tułowia za pomocą regulatora (9). Jeśli jest taka potrzeba odetnij nadmiar taśmy.
EN: Adjust the length of the strap to the circumference of the torso with the guide (9). If necessary, cut off any excess tapes.

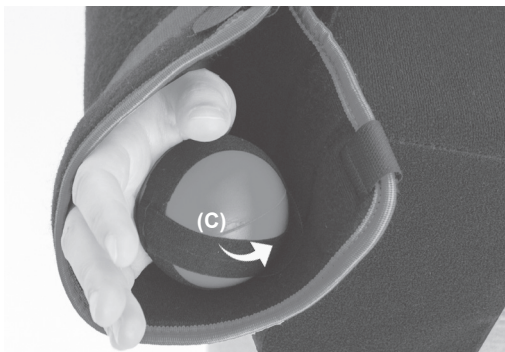

- 9. PL:** Przypnij plikę (C) z rzepem do wewnętrznej strony rękawa w odpowiednim miejscu.
EN: Attach the ball (C) to the inside of the sleeve in the right place.



- 10. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.