

| | |
|----------------|-------------------------|
| KOD KATALOGOWY | AM-TX-05 |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA TUŁOWIA |
| MODEL | ORTEZA TUŁOWIA AM-TX-05 |
| | |
| CODE | AM-TX-05 |
| TRADE NAME | TORSO SUPPORT |
| MODEL | TORSO SUPPORT AM-TX-05 |



- 1. PL:** Załóż ortezę na ramiona, ustaw pelotę grzbietową na odpowiedniej wysokości (1) i zapnij rzep (2).
EN: Put the brace on your shoulders, set the back pad at the right height (1) and fasten the Velcro (2).

- 2. PL:** Przepleć pasy przez klamki, ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzepy (3,4).
EN: Interlace the straps through the buckles, set the appropriate compression and fasten the Velcro (3,4).



- 3. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.