

KOD KATALOGOWY	AM-PES-06
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-PES-06
CODE	AM-PES-06
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-PES-06



1. PL: Rozepnij ortezę, poluzuj zapięcia (1,2) i załóż wyrób na ramiona.

EN: Unfasten the brace, loosen the fasteners (1,2) and put the device on your shoulders.




2. PL: Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij przednią część ortezi na rzepy (3).

EN: Set the correct compression and fasten the front part of the brace with Velcro (3).

3. PL: Ustaw odpowiednią kompresję pasów dociągowych i zapnij je na rzepy (4,5) w przedniej części ortezi.

EN: Set the appropriate compression of the tension belts and fasten them with Velcro (4,5) in the front part of the brace.

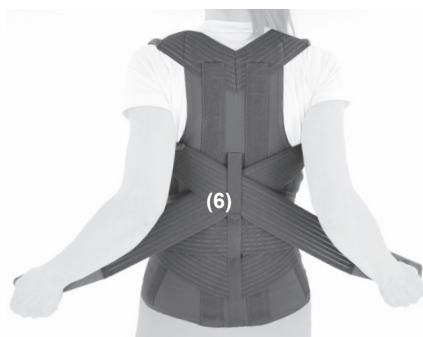

4. PL: Ustaw odpowiednią kompresję szelek (6) i przypnij z przodu na rzepy (7,8).

EN: Set the appropriate belts compression (6) and fasten at the front with Velcro (7,8).





5. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.