



KOD KATALOGOWY	OKD-31
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	OKD-31
CODE	OKD-31
TRADE NAME	LOWER LIMB SUPPORT
MODEL	OKD-31

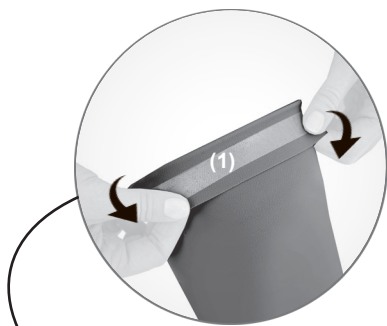

1. PL: Odwiń górny element ortezy w taki sposób, aby cała szerokość przedniego paska silikonowego (1) znalazła się na zewnątrz ortezy.

EN: Unwrap the upper part of the brace, so that the entire width of the front silicone strap (1) is outside the brace.

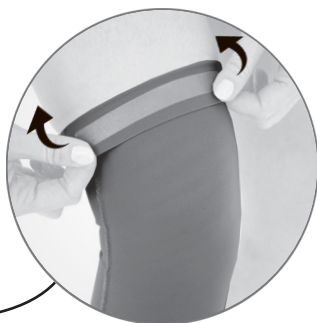

2. PL: Załóż ortezę na nogę i podciągnij do góry. Następnie odwiń górny mankiet, aby pasek silikonowy znalazł się na skórze.

EN: Place the brace on the hand and pull up. Then unfold the upper part of the brace, so that the silicone strap is on the skin.



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.