



KOD KATALOGOWY	AS-LK-02/CCA
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	AS-LK-02/CCA
CODE	AS-LK-02/CCA
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	AS-LK-02/CCA

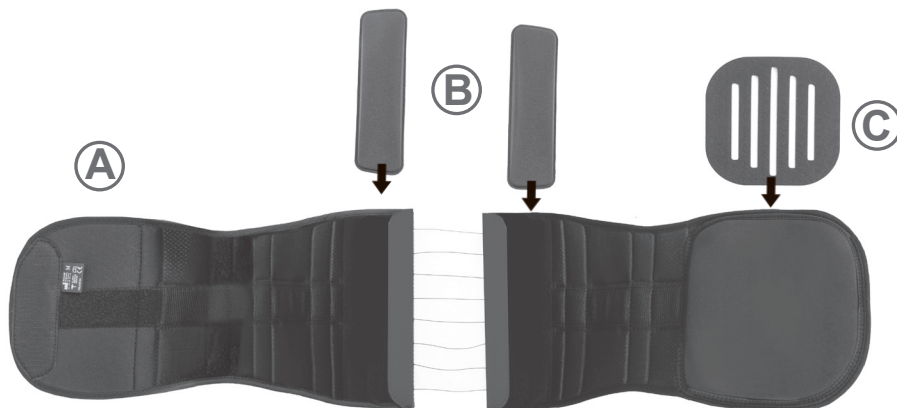

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| A. Orteza lędźwiowo-krzyżowa | A. Back brace      |
| B. Dwie peloty lędźwiowe     | B. Two lumbar pads |
| C. Pelota brzuszna           | C. Abdominal pad   |

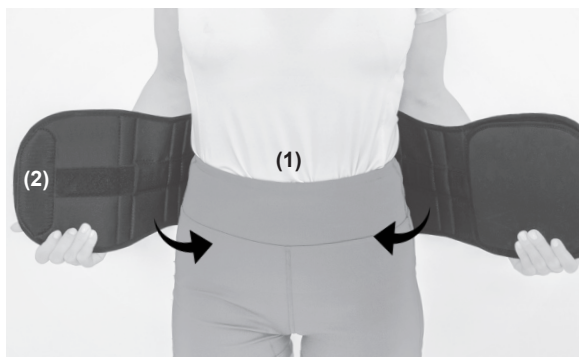

- 1. PL:** Przyłóż ortezę do pleców (1) i zapnij z przodu na rzep (2).  
**EN:** Place the brace on your back (1) and fasten at the front with Velcro (2).



- 2. PL:** Ustaw właściwą kompresję wyrobu przez naciągnięcie linki za pomocą klamerki (3). Zapnij element na przedniej części produktu.  
**EN:** Set the required level of compression by pulling the grip (3). Attach the Velcro into abdominal part of the brace.



- 3. PL:** Gotowy wyrób (przód).  
**EN:** Product is ready to use (front view).



- 4. PL:** Gotowy wyrób (tył).  
**EN:** Product is ready to use (back view).

- PL:** UWAGA! Istnieje możliwość stosowania wyrobu bez peloty brzusznej (C).  
**EN:** ATTENTION! The brace can be used without an abdominal pad (C).



- 5. PL:** Przy ponownym użytkowaniu wyrobu zwróć uwagę, aby element napinający znajdował się przy przelotkach (patrz rysunek).  
**EN:** Before using the back brace again, set the pulling strap loosely (see figure above).