



KOD KATALOGOWY	IB-SKL/1R
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ IB-SKL/1R
CODE	IB-SKL/1R
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT IB-SKL/1R

- 1. PL:** Rozepnij ortezę i poluzuj tylne pasy.
EN: Unfasten the brace and loosen the rear straps.

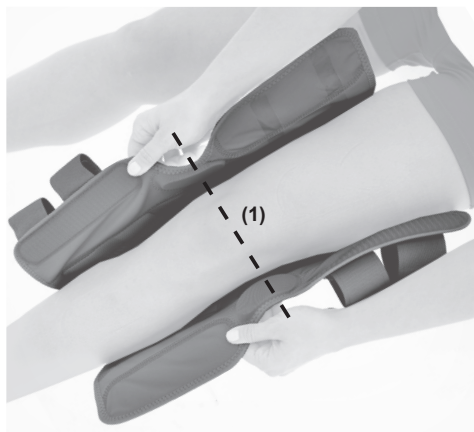

- 2. PL:** Przyłóż ortezę do nogi (1) w taki sposób, aby zegary znajdowały się w osi stawu kolanowego.
EN: Place the brace on the leg (1) in such a way that the drop locks are in the axis of the knee joint.

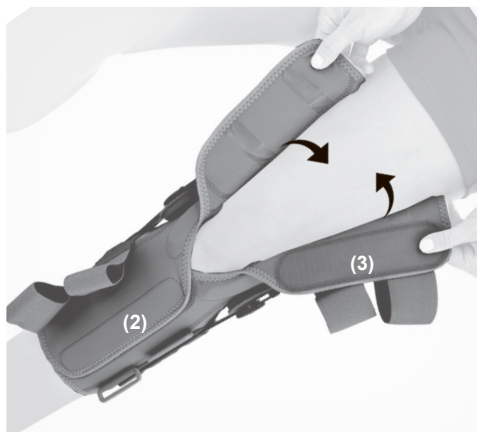

- 3. PL:** Zapnij ortezę na rzepy w podanej kolejności (2,3).
EN: Fasten the brace at the back with Velcro according to the following steps (2,3).



4. PL: Przepleć taśmy przez klamry i zapnij je w podanej kolejności (4,5,6,7,8,9,10,11).

EN: Interlace the straps through the buckles and fasten them in the order shown (4,5,6,7,8,9,10,11).



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.